

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-pasta-retrakcyjna-astringent-25-sztuk-p-2777.html>



3M pasta retrakcyjna Astringent 25 sztuk

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	3M Espe (Solventum)


Opis produktu

Pasta retrakcyjna Astringent to prosty i skuteczny środek do retrakcji dziąseł.

Właściwości:

- bardzo cienka końcówka dociera bezpośrednio do szczeliny dziąsłowej,
- zapewnia czystą, suchą szczelinę dziąsłową i silną hemostazę,
- higieniczna kapsułka z pojedynczą dawką,
- w porównaniu z nićmi retrakcyjnymi: wygodny i oszczędzający czas proces retrakcji – szybszy nawet o 50%.

Szybkie, wygodne i skuteczne rozwiązanie dla każdego zabiegu dentystycznego, który wymaga retrakcji dziąseł — pastę retrakcyjną 3M Astringent można łatwo dozować bezpośrednio do kieszonki dziąsłowej przez dyspenser do kompozytów w kapsułkach. Bardzo cienka końcówka naszej kapsułki jednorazowego użytku umożliwia precyzyjne podanie pasty hemostatycznej, która delikatnie cofa tkankę i tamuje krwawienie. Pozwala to na szybkie wykonanie szczegółowego wycisku przygotowania marginesu przy większym komforcie pacjenta.

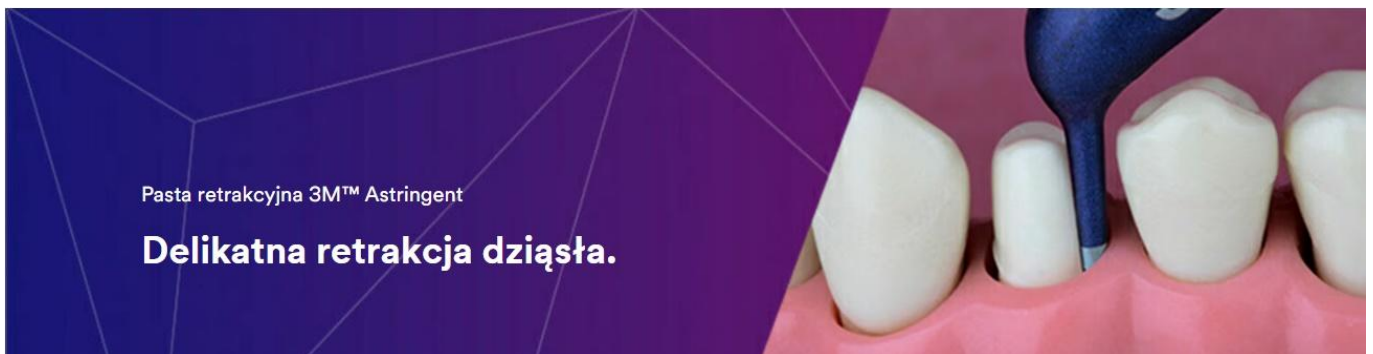

Pasta retrakcyjna 3M Astringent to szybkie, wygodne i skuteczne rozwiązanie do retrakcji dziąseł, oferujące przewagę nad nićmi retrakcyjnymi, których zakładanie może być trudne i czasochłonne. Bardzo cienka końcówka dostarcza pastę ściągającą zawierającą 15% chlorku glinu bezpośrednio do bruzdy, delikatnie odpychając kieszonkę dziąsłową od zęba, dzięki czemu można skutecznie uchwycić szczegółowy wycisk przygotowania marginesu. Może służyć do pobierania wycisków materiałowych lub cyfrowych do wypełnień klasy II i V.

Jedną nić można zastąpić pastą retrakcyjną 3M Astringent, umożliwiającą tymczasową retrakcję dziąsła brzeżnego i zapewnienie suchej bruzdy na zdrowym przyzębiu. Może służyć do pobierania wycisków materiałowych lub cyfrowych do wypełnień klasy II i V.



Wyciśnij niewielką ilość pasty i wyrzuć. Umieść końcówkę kapsułki z pastą retrakcyjną w kieszonce dziąsłowej. Tkanka cofa się mechanicznie.



Umieść końcówkę w szczelinie. Powoli i jednostajnie wstrzyknij pastę retrakcyjną Astrigent do szczeliny. Całkowicie ją wypełnij.



Pozostaw pastę retrakcyjną Astrigent na miejscu przez co najmniej 2 minuty.



Całkowicie usuń pastę retrakcyjną Astrigent za pomocą wody i powietrza używając przy tym ssaka.



Zobacz jak pasta retrakcyjna 3M™ Astrigent umożliwia dostęp międzyzębowy i sprawia, że proces pobierania wycisków pod korony jest wygodniejszy, higieniczny i efektywny.



Zobacz, jak pasta retrakcyjna 3M™ Astrigent skutecznie kontroluje wilgoć i zapewnia dostęp do brzegu preparacji bez potrzeby stosowania nici retrakcyjnych.

Proponowane zastosowania:

- retrakcja dziąsła brzeżnego zdrowego przyzębia,
- przygotowanie do wycisków tradycyjnych lub cyfrowych,
- przygotowanie wypełnień klasy II i V,
- przygotowanie do cementowania uzupełnień tymczasowych i stałych.

Opakowanie: 25 kompiul.