

Link do produktu: <https://higienadent.com/aqtlabo-paski-do-sterylizacji-2x250szt-p-2051.html>

AQTLabo paski do sterylizacji 2x250szt.



Cena	37,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00093
Producent	AQTLabo

Opis produktu

AQTLabo Paski do sterylizacji. Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Wykonane w formie paska papierowego z perforacją, na który naniesiono substancję testową koloru niebieskiego. Zawierają wskaźniki chemiczne typu 4, które reagują na dwie lub więcej zmiennych krytycznych parametrów procesu sterylizacji parą wodną.

Czas reakcji wskaźnika jest kontrolowany przez precyzyjnie dobrany, nietoksyczny skład chemiczny, który jest pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich. Po prawidłowym procesie zachodzi zmiana barwy z niebieskiej na czarną, w zakresie temperatur: 121°C - 134°C i czasie 20 min. - 3,5 min. Wskaźniki nadają się do stosowania w pakietach zawierających min. narzędzia metalowe, materiały porowate, gumowe, tworzywa sztuczne i bieliznę bawełnianą. Można je stosować we wszystkich typach sterylizatorów parowych niezależnie od wielkości komory.

Sposób użycia i odczyt wyników:

- w przypadku, gdy nie są stosowane w procedurze kontroli pakiety reprezentatywne, wskaźnik należy zastosować nie tylko w każdym cyklu, ale także w każdym poddanym sterylizacji pakiecie,
- umieścić test wewnątrz pakietu przeznaczonego do sterylizacji,
- załadunek poddać cyklowi sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
- po przeprowadzonym procesie sterylizacji odczytać wynik testu - w wyniku prawidłowego przebiegu wskaźnik zmieni zabarwienie koloru z niebieskiego na czarny.

Opakowanie: 200 pasków testowych dzielonych na dwa (sumarycznie 400 testów do wykonania)

Rozmiar całego wskaźnika: 1,7 cm x 20,5 cm, po przedzieleniu: 1,7 cm x 10,25 cm.

Opakowanie: 2x250szt.