

Link do produktu: <https://higienadent.com/arkona-tabletki-muson-90-szt-p-827.html>



## ARKONA tabletki MUSON / 90 szt.

Cena	<b>55,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>Arkona</b>

### Opis produktu

**MUSON** tabletki to wyrób medyczny, który chroni lekarza przed zakażeniami od pacjenta. Występuje w postaci tabletek musujących, rozpuszczalnych w wodzie. Opakowanie MUSONU zawiera 90 tabletek. Jedna tabletką przeznaczona jest do rozpuszczenia w 200 ml wody.

#### Jak używać **MUSON**

W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów MUSON należy stosować przy każdym płukaniu ust podczas zabiegu.

- Wkładamy tabletkę do kubeczka z wodą (200 ml).
- Czekamy na całkowite rozpuszczenie tabletki (ok 30-40 s).
- Pacjent powinien starannie przepłukać usta.
- Roztwór pozostaje aktywny, nawet gdy tabletką przestanie „musować”.

#### Jak działa **MUSON**

Roztwór przygotowany na bazie tabletki MUSON uwalnia drobnoustroje zagnieżdżone/ukryte w osadach nazębnych i ślinie. MUSON eliminuje większość drobnoustrojów ze śliny. Preparat umożliwia mechaniczne usunięcie uwolnionych drobnoustrojów, dzięki czemu przestają one stanowić zagrożenie dla zdrowia lekarza. Intensywne przepłukanie ust i wyplucie preparatu jest niezbędne do prawidłowego działania roztworu.

#### Skład chemiczny MUSONU:

- Dioctan chlorheksydyny (Chlorhexidine diacetate)
- Kwas cytrynowy
- Kwas winowy
- Wodorowęglan sodu
- Stearynian magnezu
- Aromat miętowy
- Sorbitol
- Benzoesan sodu

#### Przeciwwskazania do stosowania MUSONU

Nie należy stosować MUSONU w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Interakcji nie stwierdzono. MUSON jest preparatem bezpiecznym, może być stosowany według indywidualnych potrzeb, nie powoduje uzależnień ani powikłań. W przypadku ostrych stanów zapalnych błony śluzowej czy otwartych ran jamy ustnej, stosowanie roztworu tabletki może wywoływać reakcje bólowe.

#### Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze stosowaniem MUSONU?

- Preparat może być stosowany w chorobie wrzodowej, cukrzycy oraz u kobiet w ciąży.
- Preparat nie wpływa negatywnie na prowadzenie i obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.
- Należy unikać kontaktu roztworu MUSONU z oczami. W razie kontaktu, koniecznie przepłukać dużą ilością wody i poradzić się specjalisty.
- Preparat jest przeznaczony dla lekarzy stomatologów i higienistek stomatologicznych.
- Nie należy stosować MUSONU po upływie terminu ważności.
- Nie wolno stosować MUSONU u dzieci poniżej 6 roku życia.
- Nie połykać tabletki.
- Nie połykać roztworu powstałego po rozpuszczeniu tabletki.
- Nie stosować roztworu przed całkowitym rozpuszczeniem się tabletki.

---

#### Jak bezpiecznie przechowywać MUSON

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej i w miejscu niedostępnym dla dzieci lub osób nieuprawnionych. Ze względu na silną higroskopijność, tabletki powinny być użyte natychmiast po otwarciu.

#### Parametry produktu:

- stabilny dzięki dodatkowi modyfikowanego wodorowęglanu sodu (Effer-Soda)
- naturalny aromat miętowy
- bez alkoholu
- bez sztucznych barwników i konserwantów.

Opakowanie: 90 tabletek.