

## Arkona wytrawiacz / 13g



Cena	<b>24,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000292</b>
Producent	<b>Arkona</b>

### Opis produktu

**Wskazania: wytrawianie szkliwa za pomocą wytrawiacza służy do zwiększenia przyczepności i utrzymania uzupełnień stomatologicznych. Zabezpiecza przed występowaniem szczeliny brzeżnej.**

Może być stosowany przy:

- wypełnieniach chemo- i światłoutwardzalnych
- lakach szczelinowych
- ortodontycznych aparatach stałych

Sposób użycia: na dokładnie oczyszczoną i osuszoną powierzchnię szkliwa nałożyć cienką warstwę Wytrawiacza. Pozostawić na zębie około 30-60 sekund. Następnie przepłukać silnym strumieniem wody. Dokładnie osuszyć aż szkliwo uzyska matowo-biały kolor. Wytrawiacze należy powtórzyć jeśli szkliwo nie zmatowieje lub nie zostanie zanieczyszczone śliną. Nie wytrawiać dłużej niż 120s.

Środki ostrożności: podczas wytrawiania poleca się stosowanie osłon oczu dla pacjenta i personelu. Unikać kontaktu z oczami, miękkimi tkankami jamy ustnej oraz skórą. W razie kontaktu przepłukać dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami natychmiast poradzić się specjalisty.

Właściwości produktu:

- optymalna żelowa konsystencja
- idealne pokrywanie trawionych powierzchni
- łatwe spłukiwanie bez pozostawiania resztek
- nie barwi zębów

Dostępny w strzykawkach 13g, 2,6g i 60g.