

Link do produktu: <https://higienadent.com/arkona-wytrawiacz-2-6g-p-1320.html>

Arkona wytrawiacz / 2,6g



Cena	9,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT002807
Producent	Arkona

Opis produktu

Wskazania: wytrawianie szkliwa za pomocą wytrawiacza służy do zwiększenia przyczepności i utrzymania uzupełnień stomatologicznych. Zabezpiecza przed występowaniem szczeliny brzeżnej.

Może być stosowany przy:

- wypełnieniach chemo- i światłoutwardzalnych
- lakach szczelinowych
- ortodontycznych aparatach stałych

Sposób użycia: na dokładnie oczyszczoną i osuszoną powierzchnię szkliwa nałożyć cienką warstwę Wytrawiacza. Pozostawić na zębie około 30-60 sekund. Następnie przepłukać silnym strumieniem wody. Dokładnie osuszyć aż szkliwo uzyska matowo-biały kolor. Wytrawiacze należy powtórzyć jeśli szkliwo nie zmatowieje lub nie zostanie zanieczyszczone śliną. Nie wytrawiać dłużej niż 120s.

Środki ostrożności: podczas wytrawiania poleca się stosowanie osłon oczu dla pacjenta i personelu. Unikać kontaktu z oczami, miękkimi tkankami jamy ustnej oraz skórą. W razie kontaktu przepłukać dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami natychmiast poradzić się specjalisty.

Właściwości produktu:

- optymalna żelowa konsystencja
- idealne pokrywanie trawionych powierzchni
- łatwe spłukiwanie bez pozostawiania resztek
- nie barwi zębów

Dostępny w strzykawkach 13g, 2,6g i 60g.