

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-bowie&dick-test-do-kontroli-sterylizacji-w-autoklawie-1szt-p-2166.html>



## Bms Dental Bowie&Dick - test do kontroli sterylizacji w autoklawie 1szt.

Cena	<b>8,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#KAT00349</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

**Bms Dental Bowie&Dick test dla autoklawów klasy B w celu kontrolowania przenikania pary i usuwania powietrza w porowatych ładunkach.**

Przy wykonywaniu tego rodzaju testu potrzebna jest tylko jedna taca w autoklawie. Aby wynik testu był pomyślny, kolor spirali musi całkowicie zmienić się z żółtego na czarny.

Właściwości:

- do kontrolowania przenikania pary i usuwania powietrza,
- test kontroli o wysokiej precyzji,
- test dla autoklawów klasy B.

**Zgodnie z zaleceniami oraz normą "bezpiecznego gabinetu" test BMS Dental Bowie&Dick należy stosować codziennie, przed rozpoczęciem pracy a także po naprawie lub przeglądzie autoklawu.**

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku na teście **BMS Dental Bowie&Dick** (co oznacza brak zmiany koloru z żółtego na kolor czarny) test należy powtórzyć. Po powtórnym przeprowadzeniu testu w sytuacji gdy wynik jest pozytywny należy przeprowadzić ostatni, trzeci test. Pozytywny wynik dalej nam pewność bezpiecznej sterylizacji. W sytuacji kiedy dwa pierwsze testy **BMS Dental Bowie&Dick** są negatywne należy uznać, że autoklaw jest niesprawny.

Opis powyższego produktu jest chroniony prawami autorskimi twórcy. Na jego wykorzystanie wymagana jest zgoda właściciela praw autorskich - firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie.