

Link do produktu: <https://higienadent.com/alginian-chromatyczny-do-wyciskow-bms-dental-italgin-450g-p-1686.html>



Alginian chromatyczny do wycisków Bms Dental Italgin 450g

Cena	19,99 zł
Cena poprzednia	24,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000892
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Bms Dental Italgin alginian chromatyczny do wycisków o wysokiej precyzji i wysokiej elastyczności. Dzięki wskaźnikowi fazy chromatycznej przygotowanie wycisku jest znacznie uproszczone.


Wskazania:

- modele badawcze,
- proteza stała i zdejmowana,
- wyciski tymczasowe


Sugestie:

- Podczas przygotowywania wycisku wlej do kubeczka najpierw wodę, a następnie proszek. Zmniejszy to pęcherzyki powietrza i poprawi jakość mieszanki.
- Spłukać wodą i zdezynfekować wycisk przed przechowywaniem.
- Przechowuj alginian w oryginalnym opakowaniu z zamkniętym klipsem.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Przechowywać w suchym miejscu.

Dozowanie:

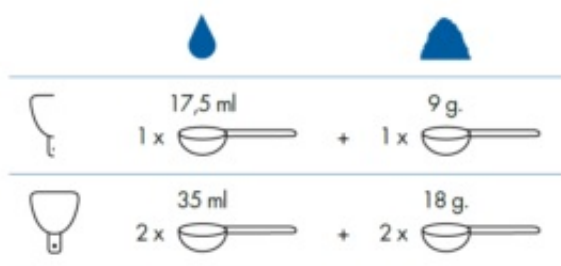

ITALGIN chromatic phases:
Phases chromatiques de ITALGIN :

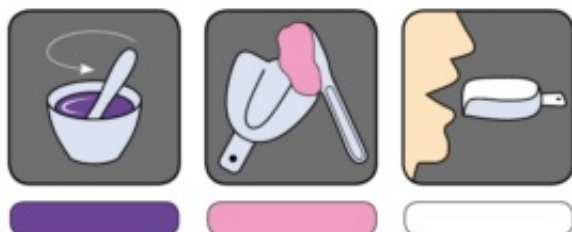

Czas mieszania 60s

Całkowity czas pracy łącznie z czasem mieszania 1:50

Czas w ustach 30s

Całkowity czas wiązania 3:20

Wyższa temperatura skraca czas pracy i wiązania, a niższa temperatura wydłuża czas pracy i wiązania.

Opakowanie: 450g