

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-white-38-profesjonalny-ziel-do-wybielania-zebow-p-1681.html>



## BMS Dental WHITE 38% profesjonalny żel do wybielania zębów

Cena	<b>230,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>240,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000064</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

**BMS Dental WHITE 38% - profesjonalny żel do wybielania zębów. Produkt do użytku WYŁĄCZNIE W GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH.**

**Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami o działanie BMS Dental White 38%. Odpowiedzi udziela dr n. med. Katarzyna Ostrowska.**



### Cechy produktu:

- krótki czas wybielania: bielsze zęby do 8 odcieni w zaledwie 30 minut!;
- delikatne wybielanie z optymalnymi rezultatami,
- do nakładania bezpośrednio na zęby,
- produkt może być stosowany do zębów z dyschromią,
- procedurę wybielania można powtarzać aż do uzyskania pożądanego koloru,
- pojedyncze partie lub kilka partii dotkniętych dyschromią lub dewitalizacją można wybielać jednocześnie,
- idealny do usuwania plam spowodowanych lekami, fluorozą; przebarwień i osadów związanych z żywnością, zmianami spowodowanymi procesem starzenia.

### Jak używać BMS Dental White 38%:

1. Przed rozpoczęciem procesu wybielania sprawdź z pacjentem odcień jego zębów w celu porównania z ostatecznym odcieniem.
2. Sprawdź czy wybielane zęby są idealnie czyste.
3. Zapewnij wygodny dostęp do jamy ustnej pacjenta zabezpieczając jego wargi i policzki (np. rozwieraczem do ust).
4. Nałóż produkt bezpośrednio na powierzchnię zębów za pomocą aplikatora.
5. Wystaw na światło LED przez 10-15 minut.
6. Dokładnie usuń żel z powierzchni zębów za pomocą gazy.
7. Procedurę można powtarzać aż do uzyskania pożądanego koloru.
8. Porównaj początkowy odcień zębów z uzyskanym efektem.
9. Na koniec usuń zabezpieczenie jamy ustnej (rozwieracz), wypłucz usta dużą ilością wody.
10. Jeśli to konieczne, w razie potrzeby zastosuj miejscowo fluor lub (w przypadku pacjentów z nadwrażliwością zębów) środki odczulające.

### Zestaw Bms White 38% zawiera:

- 2 strzykawki (po 2,5ml każda) 4:1 z 38% żelem wybielającym zawierającym nadtlenek wodoru,
- 2 strzykawki (po 1,5g każda) do ochrony dziąseł,
- 6 kaniul mieszających,

- 
- instrukcję

**[Instrukcja stosowania BMS Dental WHITE 38%:](#)**



**Produkt jest produktem profesjonalnym, dostępnym WYŁĄCZNIE dla gabinetów stomatologicznych oraz dla lekarzy stomatologów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.10.2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. poz. 1185) dot. stosowania nadtlenu wodoru (i związków go uwalniających); niniejszy produkt zakupić może WYŁĄCZNIE lekarz stomatolog, po okazaniu numeru wykonywania zawodu oraz numeru identyfikacji podatkowej. Do transakcji obowiązkowym dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT. Zamówienia indywidualne zostaną przez nas anulowane.**