

Link do produktu: <https://higienadent.com/centrix-champ-0-25ml-material-do-lakowania-zebow-p-1339.html>

CENTRIX Champ / 0,25ml - materiał do lakowania zębów.



Cena	12,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000776
Producent	Centrix

Opis produktu

Materiał do lakowania zębów. CHAMP jest materiałem uszczelniającym do rowków i zagłębień, zapakowany w pojedyncze dawki. Każda pojedyncza dawka zawiera 0,25ml materiału i pędzelek do nanoszenia Benda Brush.

Zalety:

- Zarówno do uszczelnień pojedynczych jak i złożonych.
- Nie wymaga klejenia (klej amylo-zębinowy).
- Uwalnia fluor.
- Okres trwałości około trzech lat na powierzchni żującej i około 5 lat na powierzchniach językowych , podniebiennych i przedgardłowych.
- Proste nałożenie materiału pędzlem z guzka na guzek jest wystarczająca dla doskonałego uszczelnienia.
- O wiele łatwiejszy do nałożenia, niż materiały nakładane przy użyciu strzykawki.
- Wszystko czego potrzeba, to jeden zestaw uszczelniający: materiał i pędzelek.
- Bez zakażeń krzyżowych.
- Doskonała kontrola zapasów, jak i ceny jednorazowego zastosowania.
- CHAMP™ zawiera żywicę, która toleruje wilgotność i nie ulega mikroporowatości.
- Nie zawiera: Bisphenolu A, Bis GMA lub Bis DMA.

Sposób użycia:

- Oczyszczyć szkliwo przez szczotkowanie produktami nie zawierającymi substancji oleistych. Usunąć złogi.
- Jeżeli jest to konieczne usunąć szkliwo, które stwarza problemy (dontoplastyka).
- Zdemineralizować powierzchnię zęba poprzez nałożenie 40 % kwasu fosforowego przez 15 sekund. Porządnie przemyć.
- Lekko osuszyć i usunąć nadmiar wilgoci.
- Otworzyć pojedynczą dawkę CHAMPTM i nałożyć materiał poprzez pędzelkowanie od jednego guzka do następnego.
- Utwardzać świetlnie przez 20 sekund.
- Zweryfikować i poprawić zgryz w razie potrzeby.

Opakowanie: 0,25ml