

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-endo-prep-cream-preparat-do-poszerzania-kanalow-korzeniowych-w-formie-kremu-p-1133.html>



Cerkamed Endo-Prep Cream - preparat do poszerzania kanałów korzeniowych w formie kremu

Cena	47,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00516
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Cerkamed Endo-Prep Cream preparat do poszerzania kanałów korzeniowych w formie kremu. Preparat przeznaczony jest do chemiczno-mechanicznego oczyszczania i opracowywania kanałów korzeniowych. Poprzez zawarte w preparacie substancje poślizgowe praca za pomocą narzędzi kanałowych jest ułatwiona, a ryzyko złamania narzędzia w kanale jest zminimalizowane.

Zastosowanie i właściwości preparatu Endo-Prep Cream:

- stosowany jest podczas chemiczno-mechanicznego oczyszczania i opracowywania kanałów korzeniowych.
- zawiera substancje poślizgowe ułatwiające wprowadzenie narzędzia do kanału oraz minimalizujące niebezpieczeństwo jego zaklinowania lub złamania wewnątrz kanału.
- wersenian disodowy (EDTA) zawarty w preparacie wypłukując jony wapnia i magnezu powoduje rozmiękczenie powierzchniowej warstwy zębiny ułatwiając jej usunięcie i udrożnienie kanału. Działanie wersenianu disodowego polega na reakcji z mineralnymi składnikami tkanek twardych zęba. Poprzez absorpcję z kanału zęba głównie wapnia, wersenian disodowy rozmiękcza tkankę i ułatwia mechaniczne udrożnienie kanału zębowego.
- doskonale dobrana konsystencja gwarantuje wygodę aplikacji i możliwość umieszczenia preparatu bezpośrednio na narzędziu kanałowym.
- zastosowanie strzykawek typu luer-lock daje gwarancję bezpieczeństwa podczas aplikacji - strzykawki posiadają gwint typu luer-lock pozwalający na połączenie z igłą poprzez nakręcenie jej na strzykawkę, system luer-lock stanowi najlepsze zabezpieczenie przed niezamierzonym rozlaniem preparatu podczas aplikowania.

Użycie produktu:

Odizolować leczony ząb za pomocą koferdamu. Wypełnić preparatem komorę zęba lub umieścić preparat bezpośrednio na narzędziu kanałowym. Opracowywać mechanicznie kanał przepłukując roztworem podchlorynu sodu (np. CHLORAXiD).

Wygoda użytkowania:

Pełną wygodę oraz precyzję aplikacji zapewniają wysokiej jakości strzykawki, w które konfekcjonowane są nasze preparaty. Gwint luer-lock oraz gumowy tłoczek strzykawki zapewniają komfort i bezpieczeństwo pracy.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Dostępne opakowanie: 5ml, 10ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 10ml , 5ml