

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-fluor-defender-maxi-10-x-1ml-p-2077.html>



## Cerkamed Fluor Defender Maxi 10 x 1ml

Cena	<b>86,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00165</b>
Producent	<b>Cerkamed</b>

### Opis produktu

**Fluor Defender Maxi** Lakier ochronny z fluorem dla dzieci.

Właściwości:

- Wzmacnianie odporności szkliwa,
- Profilaktyka próchnicy
- Dzięki zawartości fluoru działa remineralizująco na szkliwo.
- Tworzy na powierzchni film ochronny.

Skład: 0,1% fluorosilan, HEMA

Sposób użycia:

- Oczyszczyć powierzchnie zębów
- Osuszyć za pomocą strumienia powietrza lub wałków z ligniny
- Odizolować obszar roboczy za pomocą koferdamu
- Otworzyć ampułkę i pobrać do przygotowanego wcześniej naczynia około 3 krople preparatu
- Nakładać równomiernie cienką warstwę przy pomocy załączonego pędzelka
- W przypadku wąskich przestrzeni międzyzębowych można użyć nici dentystycznych
- Osuszyć łagodnie strumieniem powietrza
- Usunąć koferdam
- Nie jeść i nie płukać jamy ustnej przez minimum 45 min po zabiegu
- Fiolka wyrobu przeznaczona jest dla 2-3 pacjentów z pełnym uzębieniem, pędzelek służy do użycia jedнокrotnego.
- Wielokrotne użycie pędzelka może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia. Lakier nie wymaga utwardzania światłem.

Dostępne opakowanie:

Fluor Defender maxi: 10 x 1ml preparatu + komplet pędzelków

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA