

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-wytrawiacz-blue-etch-flow-10ml-p-2930.html>

CERKAMED wytrawiacz Blue Etch Flow 10ml



Cena	25,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Wytrawiacz BLUE ETCH FLOW stosuje się do wytrawiania szkliwa i zębiny przed zastosowaniem materiałów złożonych, laków do bruzd i szczelin.

Nadaje się również do stosowania przed cementowaniem wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego. Ze względu na odpowiednio dobraną, półpłynną konsystencję BLUE ETCH FLOW dociera do trudno dostępnych bruzd i szczelin, zapewniając ich dokładne wytrawienie.

Bazując na właściwościach najlepszego wytrawiacza na rynku BLUE ETCH opracowaliśmy super płynny wytrawiacz BLUE ETCH FLOW polecany do wytrawiania bruzd i szczelin. Specjalna, super płynna konsystencja wytrawiacza, opracowana pod kierunkiem renomowanych lekarzy praktyków, umożliwi perfekcyjne wytrawienie najtrudniej dostępnych miejsc. Dodatkowo łatwo się spłukuje.

Skład:

- kwas o-fosforowy 36%,
- baza żelowa,
- barwnik

Kolor: fioletowy

Opakowania:

- strzykawka 2 ml + zestaw aplikatorów
- strzykawka 10 ml + dozownik, łącznik, zestaw aplikatorów
- strzykawka 50 ml + zestaw dozowników, łącznik, zestaw aplikatorów

UWAGA!

Wyrób przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednokrotnego. Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.