

Link do produktu: <https://higienadent.com/cerkamed-zinc-oxide-fast-50g-material-szybkowiazacy-do-sporzadzania-past-p-3217.html>



## Cerkamed Zinc Oxide Fast 50g materiał szybkowiązący do sporządzania past

Cena	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Cerkamed</b>

### Opis produktu

**Cerkamed Zinc Oxide Fast materiał szybkowiązący do sporządzania past.** W połączeniu z Eugenolem służy jako środek do czasowych wypełnień ubytków i kanałów korzeniowych, działa osuszająco, pobudza do wytwarzania zębiny wtórnej. Zinc Oxide Fast ze względu na wzbogaconą recepturę wymaga mniejszej ilości eugenolu, wymaga mniej czasu na rozrobienie, szybko wiąże w ubytku oraz nie wypłukuje się z ubytku jak podobne preparaty.

**Cerkamed Zinc Oxide Fast** zastosowanie:

- Materiał do czasowych wypełnień: do zamknięcia ubytku próchnicowego lub wkładki dewitalizacyjnej
- Materiał do czasowego lub stałego cementowania
- Wypełnienie tymczasowe do kanałów
- Cement chirurgiczny

**Zinc Oxide Fast** czas mieszania z Eugenolem: 30-50 sekund, czas wiązania: 10 minut. Substancja czynna: tlenek cynku 99,7%.

**WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.**

**Opakowanie:** Cerkamed Zinc Oxide Fast 50g, akcesoria.