

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-alustin-10g-plyn-do-tamowania-drobnych-krwawien-prydziaslowych-p-1746.html>



Chema Alustin 10g - płyn do tamowania drobnych krwawień przydziąsłowych

Cena	22,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000304
Producent	CHEMA

Opis produktu

Chema Alustin płyn do tamowania drobnych krwawień przydziąsłowych powstałych podczas zabiegów dentystycznych w jamie ustnej i pomocny w retrakcji dziąsła; eliminuje krwawienie bez przebarwień i osadów. Może być stosowany do tamowania krwawienia bezpośrednio lub przy użyciu nici retrakcyjnych. 1 g wyrobu zawiera 0,2 g chlorku glinu sześciowodnego.

Działanie: Alustin zastosowany na krwawiące miejsce tworzy powierzchną warstwę ochraniającą. Krwawienie ustępuje po kilku minutach, co umożliwia jednoseansowe leczenie bez konieczności zakładania opatrunku czasowego.

Sposób postępowania z wyrobem:

- Podczas bezpośredniego tamowania krwawienia:
 - Miejsca krwawiące tamponować wacikiem nasączonym płynem Alustin.
 - Po ustąpieniu krwawienia wypłukać dokładnie wodą oczyszczoną lub sprayem powietrzno-wodnym.
 - W razie dalszego krwawienia czynności te należy powtórzyć.
- W przypadku zastosowania nici retrakcyjnych:
 - Nasączyć nić retrakcyjną płynem Alustin
 - Umieścić nić retrakcyjną w kieszonce i pozostawić ją na 4 do 5 minut.
 - Usunąć nić, dokładnie wypłukać kieszonkę sprayem powietrzno-wodnym lub wodą oczyszczoną, wysuszyć powietrzem z dmuchawki unitu.
 - W razie dalszego krwawienia czynności te należy powtórzyć.
 - Pobrać wycisk.

Warunki przechowywania: przechowywać w opakowaniu dokładnie zamkniętym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.

Opakowanie: 10g.