

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-pulpogel-2-4g-do-amputacji-przyżyciowej-miazgi-w-zebach-mlecznych-i-tamowania-krwawienia-p-2078.html>



## Chema Pulpogel / 2,4g - do amputacji przyżyciowej miazgi w zębach mlecznych i tamowania krwawienia

Cena	<b>40,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00308</b>
Producent	<b>CHEMA</b>

### Opis produktu

#### **Chema Pulpogel żel z siarczanem żelaza do amputacji przyżyciowej miazgi w zębach mlecznych i tamowania krwawienia.**

Zastosowanie: preparat na bazie siarczanu żelaza ma zastosowanie w zabiegach pulpotomii do przyżyciowej amputacji miazgi w zębach mlecznych. Preparat stosuje się też do tamowania drobnych krwawień powstałych podczas zabiegów stomatologicznych.

#### Opis działania:

Żel wykazuje działanie hemostatyczne: w kontakcie z krwią tworzy kompleksy białkowo- siarczanowe zamykające ujścia naczyń krwionośnych. Jego zaletą jest szybka i łatwa aplikacja: preparat wciera się w kikuty miazgi. Następnie, w przypadku amputacji przyżyciowej miazgi, po usunięciu żelu z komory (strumień powietrzno-wodny) nakłada się tlenek cynku z eugenolem i zakłada wypełnienie ostateczne.

Preparat może być stosowany jako środek hamujący krwawienie z naczyń włosowatych jamy ustnej podczas zabiegów stomatologicznych. Silnie wcierany żel w krwawiącą tkankę tworzy czopy skoagulowanej krwi w ujściach naczyń włosowatych. Przez wcieranie żelu ucina się również część skrzepu wystającą ponad brzeg naczynia, tworząc korek trwale je zamykający. Tkanki oczyszcza się mocnym strumieniem sprazu powietrzno-wodnego, co pozwala na usunięcie skrzepów, pozostałego żelu i sprawdzenie skuteczności zatamowania krwawienia

Opakowanie: 2,4g