

Link do produktu: <https://higienadent.com/chema-thymodentin-100g-wyrob-do-tymczasowego-wypelnienia-ubytkow-w-zebach-p-967.html>



Chema Thymodentin / 100g - wyrób do tymczasowego wypełniania ubytków w zębach

Cena	28,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000200
Producent	CHEMA

Opis produktu

Chema Thymodentin wyrób do tymczasowego wypełniania ubytków w zębach w okresie leczenia. Przeznaczony do wypełniania ubytków próchnicowych, jako samodzielny opatrunek (przy powierzchniowych ubytkach), lub jako pokrycie wkładek stosowanych w leczeniu próchnicy zębów.

Skład: gips modelowy, siarczan cynku, dekstryna żółta, kaolin, tlenek cynku, konserwant (tymol 0,10%).

Wyrób w postaci proszku. Po zmieszaniu z wodą w odpowiednich proporcjach, materiał twardnieje (reakcja siarczuanu i tlenku cynku oraz siarczuanu wapnia z wodą) tworząc jednorodną stałą masę.

Sposób postępowania z wyrobem:

1. Wyrób zarobić wodą na płytce szklanej do konsystencji niezbyt gęstej pasty; wprowadzając zawsze proszek do wody. Zalecana temperatura otoczenia podczas pracy z wyrobem: $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Zalecane proporcje:

2.8 g proszku : 1 ml wody.

Czas mieszania: do 60s.

2. Zarobioną pastę wprowadzić w ciągu kolejnych 30s do wcześniej opracowanego i oczyszczonego ubytku, w którym bez dostępu śliny materiał twardnieje. Czas wiązania, mierzony od początku mieszania wynosi 2-4,5 min.

Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki oraz do zamykania wkładek, które wymagają bardzo mocnego i szczelnego wypełnienia np. wkładek z preparatami do wybielania komorowego.

UWAGA: Wyrób zawiera substancję drażniącą, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Unikać kontaktu z oczami, stosować okulary ochronne. W razie kontaktu przepłukać natychmiast dużą ilością wody.

Miejsce i warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze pokojowej ($15 - 25^{\circ}\text{C}$), w suchym miejscu, w opakowaniu dokładnie zamkniętym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie:

100g