

Link do produktu: <https://higienadent.com/curaprox-bdc-weekly-105-koncentrat-do-czyszczenia-protezy-100ml-p-3478.html>



Curaprox BDC Weekly 105 koncentrat do czyszczenia protez 100ml

Cena	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Curaprox

Opis produktu

Curaprox BDC Weekly 105 koncentrat do czyszczenia protez i aparatów ortodontycznych. Polecany do cotygodniowej, intensywnej higieny. Czyści i pielęgnuje, wydłuża żywotność. Kwasek cytrynowy, olejek eukaliptusowy, sól morską naturalnie czyszczą, usuwają plamy i przebarwienia. Usuwiają pytkę nazębną pozostawiając protezę i aparat ortodontyczny czysty i gładki, o przyjemnym, świeżym zapachu. Znaczny spadek ryzyka reinfekcji wywołanych przez ukryte w protezie drobnoustroje. Biologiczna ochrona protezy. Bez środków podrażniających jamę ustną.

Sposób użycia:

1. Napełnij koncentratem BDC pojemnik BDC BOX do momentu aż kratka będzie zakryta.
2. Włóż protezę do środka i napełnij chłodną wodą do całkowitego zanurzenia protezy.
3. Dla najlepszych efektów zostaw protezę na 6-8 godzin.
4. Przepłucz dobrze przed ponownym założeniem protezy.

Skład płynu:

- Aqua,
- Citric Acid,
- Sodium Laureth Sulfate,
- Eucalyptol,
- 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol,
- Sodium Nitrate,
- Limonene,
- Methylchloroisothiazolinone,
- Methylisothiazolinone.

Opakowanie: Curaprox BDC Weekly 105 koncentrat do rozcieńczenia, 100ml.