

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-chameleon-super-files-pilniki-maszynowe-do-endodoncji-19-25mm-6szt-p-3375.html>



Denco Chameleon Super Files pilniki maszynowe do endodoncji 19-25mm 6szt.

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000690
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Super Files seria Chameleon pilniki maszynowe, narzędzia endodontyczne.


Charakteryzują się zaawansowaną technologią ceramiczno-metalową, zapewniającą doskonałą aktywację cieplną i elastyczność. Dzięki zwiększonej o 168% twardości powierzchni i 3-10 razy większej odporności na ścieranie zapewniają wyjątkową wydajność cięcia, ochronę antykorozyjną i doskonałą biokompatybilność. Wyprodukowane ze stopu niklowo-tytanowego, z zastosowaniem nanomateriałów klasy medycznej, które są bezpieczniejsze i przyjazne dla środowiska.

Specyfikacja pilników do endodoncji Denco Super Files:

- SX – narzędzie opcjonalne do tworzenia prostego dostępu i poszerzenia ujść kanałów,
- S1 – narzędzie kształtuje część koronową, docieramy nim na pełną długość roboczą ,
- S2 – narzędzie kształtuje część środkową, docieramy nim na pełną długość roboczą,
- F1,F2,F3,F4,F5 – narzędzie kształtuje część wierzchołkową.


Technika pracy narzędziami do endodoncji Denco Chameleon:

- SX – ruch wymiatający, szczotkujący,
- S1- ruch wymiatający, szczotkujący,
- S2 – ruch wymiatający, szczotkujący,
- F1 ,F2 ,F3 ,F4 ,F5 – ruch pulsacyjny, pompujący.

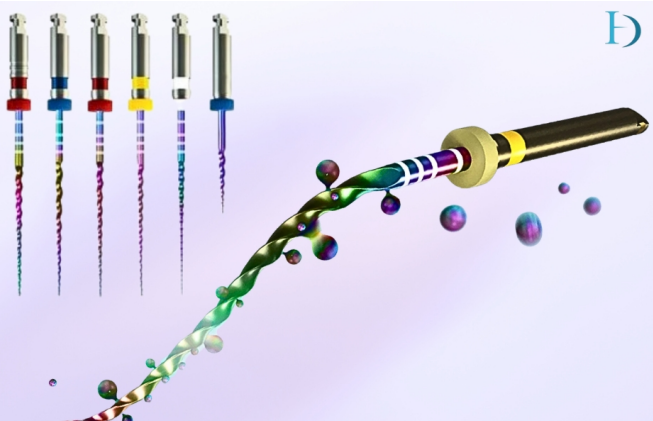CHAMELEON SERIES ROTARY FILES

(NANOTECHNOLOGIA)

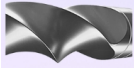

HARTOWANIE LASEROWE
ZWIĘKSZONA TWARDOŚĆ POWIERZCHNI O 168%
NIEZWYKLE PERFEKCYJNE CIĘCIE



AKTYWACJA CIEPLNA NIKLOWO-TYTANOWA W POŁĄCZENIU Z HARTOWANIEM LASEROWYM I NANOPOWŁOKĄ ZAPEWNIĄ IDEALNE POŁĄCZENIE WYDAJNOŚCI CIĘCIA I ELASTYCZNOŚCI



NANO-POWŁOKA
ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE OD 3 DO 10 RAZY



KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI POWIERZCHNIAMI

OPIS NARZĘDZI:

SX – NARZĘDZIE OPCJONALNE DO TWORZENIA PROSTEGO DOSTĘPU I POSZERZENIA UJŚĆ KANAŁÓW

S1 – NARZĘDZIE KSZTAŁTUJE CZĘŚĆ KORONOWĄ, DOCIERAMY NIM NA PEŁNĄ DŁUGOŚĆ ROBOCZĄ

S2 – NARZĘDZIE KSZTAŁTUJE CZĘŚĆ ŚRODKOWĄ, DOCIERAMY NIM NA PEŁNĄ DŁUGOŚĆ ROBOCZĄ

F1,F2,F3,F4,F5 – NARZĘDZIE KSZTAŁTUJE CZĘŚĆ WIERZCHOŁKOWĄ

TECHNIKA PRACY NARZĘDZIAMI CHAMELEON:

SX – RUCH WYMIATAJĄCY, SZCZOTKUJĄCY

S1 – RUCH WYMIATAJĄCY, SZCZOTKUJĄCY

S2 – RUCH WYMIATAJĄCY, SZCZOTKUJĄCY

F1 ,F2 ,F3 ,F4 ,F5 – RUCH PULSACYJNY, POMPUJĄCY

Długość: 19mm, 25mm

Opakowanie zawiera: pilniki do endodoncji Denco Super Files seria Chameleon, blister 6szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 19mm #SX, 25mm #F1, 25mm #F2, 25mm #F3, 25mm #F4, 25mm #F5, 25mm #S1, 25mm #S2, 25mm #SX-F3 (SX,S1,S2,F1,F2,F3)