

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-d-files-pilniki-endodontyczne-do-powtornego-leczenia-kanalowego-6szt-p-3532.html>



Denco D-Files pilniki endodontyczne do powtórnego leczenia kanałowego 6szt.

Cena	169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8%000795
Producent	Denco

Opis produktu

Denco D-Files to pilniki endodontyczne, do zastosowania w przypadku konieczności ponownego leczenia kanału korzeniowego po niepowodzeniu leczenia.


Mają one na celu usunięcie cwiaków gutaperkowych i usunięcie wypełnienia kanału korzeniowego. Wykonane ze specjalnego stopu NiTi o dobrej wytrzymałości i elastyczności.

Narzędzia Denco D-Files to zaawansowane **narzędzia endodontyczne**, które oferują doskonałą precyzję i efektywność w **leczeniu kanałowym**. Dzięki specjalistycznej konstrukcji, narzędzia te zapewniają optymalną elastyczność, umożliwiając bezpieczne opracowanie kanałów korzeniowych o różnej szerokości, nawet w trudnych przypadkach. **Pilniki endodontyczne Denco D-Files** charakteryzują się wyjątkową odpornością na złamanie, co sprawia, że są niezawodnym wyborem w **endodoncji**. Ich unikalny design ułatwia skuteczne usuwanie resztek tkanek i zapewnia płynność pracy, oferując profesjonalistom narzędzie, które łączy precyzję z trwałością.

Szczegóły produktu:

- NiTi,
- system maszynowy,
- zalecana prędkość wynosi 150-300 obr./min, moment obrotowy 2,5 N.cm,
- opakowanie listek 6 szt. w wybranym rozmiarze (D1 16mm, D2 18mm, D3 22mm, asortyment D1-D3),
- pilniki do endodoncji D-Files są wielokrotnego użytku,
- pilniki D-Files można sterylizować w autoklawie w temp. 134°C,
- zastosowanie metodą Crown-Down.

Pracuj po kolei **pilnikami do endodoncji** zaczynając od instrumentu D1. Metoda Crown-Down to nowoczesna technika opracowywania kanałów korzeniowych, która skupia się na stopniowym poszerzaniu przestrzeni od korony zęba ku wierzchołkowi korzenia. W tej metodzie najpierw opracowuje się szerokie części kanału, a następnie stopniowo przechodzi do węższych, głębszych odcinków. Taki sposób postępowania pozwala na lepsze usunięcie zanieczyszczeń, resztek tkanek oraz łatwiejsze utrzymanie kontroli nad narzędziami. Dzięki Crown-Down, lekarz może uniknąć nadmiernego poszerzenia wierzchołka kanału i minimalizować ryzyko uszkodzeń korzenia. To efektywna technika, która zapewnia precyzyjne i bezpieczne leczenie endodontyczne, ułatwiając pracę i zwiększając skuteczność terapii.

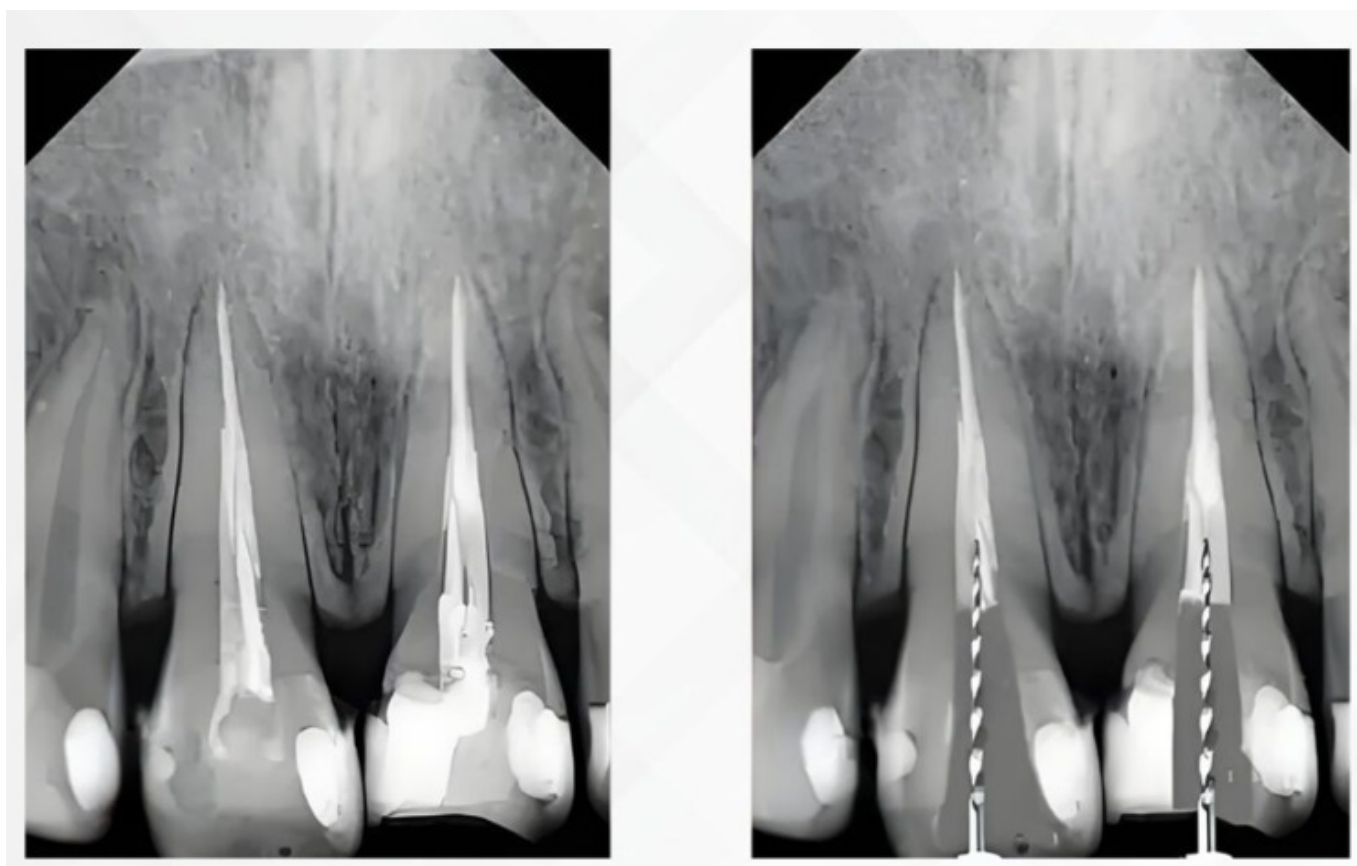

PRZED

PO

Skuteczne usunięcie pierwotnego materiału wypełniającego z kanału korzeniowego przy jednoczesnym zapobieganiu przedostawania się materiału, martwiczej tkanki wypełniającej zęba, bakterii i płynu płuczącego do tkanki okołowierzchołkowej jest kluczem do powodzenia ponownego leczenia.

Tabela rozmiarów pilników do endodencji:

Length(mm)	Size	Taper(%)	Tip(mm)	Packing
16	D1	9	0.30	6pcs/box Single or Assorted
18	D2	8	0.25	
22	D3	7	0.20	

Opakowanie: Denco pilniki endodontyczne D-Files listek 6 szt. w wybranym rozmiarze (D1 16mm, D2 18mm, D3 22mm, asortyment D1-D3)

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: D1 , D1-D3 , D2 , D3