

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-dental-dam-koferdam-stomatologiczny-36szt-p-3668.html>



Denco Dental Dam koferdam stomatologiczny 36szt.

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%001005
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Dental Dam koferdam stomatologiczny, wykonany z naturalnego lateksu.

Niezastąpiony podczas zabiegów stomatologicznych wymagających precyzyjnej izolacji pola operacyjnego – szczególnie w **endodoncji i stomatologii zachowawczej**. Dzięki odpowiedniemu rozciąganiu i wytrzymałości, Denco koferdam stomatologiczny zapewnia suchą i czystą powierzchnię roboczą, zwiększając efektywność zabiegu oraz komfort pacjenta i lekarza.

Właściwości:

- 36 arkuszy w opakowaniu,
- zapach: mięta /kolor: zielony /grubość: duża,
- wykonany z 100% naturalnego lateksu,
- rozmiar standardowy: 6 x 6 cali (152 x 152 mm),
- grubość: 0,22mm,
- elastyczny, trwały i odporny na rozerwania,
- wysoka rozciągliwość,
- idealna izolacja przed śliną, wilgocią i kontaminacją,
- kompatybilny z większością ramek i klamer do koferdamu,
- doskonały do zabiegów endodontycznych i zachowawczych.

Zastosowanie:

- koferdam do leczenia kanałowego (endodoncji),
- izolacja pola zabiegowego w stomatologii estetycznej,
- zabezpieczenie przed wilgocią w trakcie odbudowy zębów

Dimensions(inch)	Type Selection	Thickness	flavours	Unit package
6"*6"	Blue-UT(0.18mm,6"*X6")	Medium 0.18mm	Unscented	36 Sheets per box
	Green-MT(0.18mm,6"*X6")		Mint	
	Black-MS(0.18mm,6"*X6")		Mentha spicata	
	Pink-SB(0.18mm,6"*X6")		Strawberry	
	Blue-UT(0.22mm,6"*X6")	Heavy 0.22mm	Unscented	
	Green-MT(0.22mm,6"*X6")		Mint	
	Black-MS(0.22mm,6"*X6")		Mentha spicata	
	Pink-SB(0.22mm,6"*X6")		Strawberry	
	Blue-UT(0.14mm,6"*X6")	Light 0.14mm	Unscented	
	Green-MT(0.14mm,6"*X6")		Mint	
	Black-MS(0.14mm,6"*X6")		Mentha spicata	
	Pink-SB(0.14mm,6"*X6")		Strawberry	



Dostępne rodzaje produktu Denco Dental Dam:

- **zapach: mięta /kolor: zielony /grubość: duża/0,22mm**

Jak używać:

1. Połóż koferdam na płaskiej powierzchni
2. Określ ząb, którego dotyczy problem. Wybierz odpowiedni rozmiar otworu w tarczy i utwórz otwór o średnicy około 2mmw koferdamie.
3. Za pomocą szczypiec przytrzymaj/powiększ zacisk i umieść metalowy zacisk w wyciętym otworze.
4. Załóż koferdam z zaciskiem na leczony ząb.
5. Umieść ramę koferdamu na zewnątrz jamy ustnej aby utrzymać nadmiar materiału koferdamu.

Czas stosowania:

Produkt jest przeznaczony do ciągłego stosowania podczas zabiegu stomatologicznego przez czas krótszy niż 60min.

Warunki przechowywania:

Koferdam lateksowy może łatwo ulec uszkodzeniu. Utrzymanie odpowiednich warunków przechowywania jest ważne. Wiele zmiennych czynników (zwłaszcza temperatura) może wpływać na ten materiał. Dlatego temperatura przechowywania powinna być niższa niż 40°C.

Opakowanie: Denco koferdam stomatologiczny, 36szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakikolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: zapach: mięta /kolor: zielony /grubość: duża/0,22mm