

Link do produktu: <https://higienadent.com/fittydent-wodoodporne-podkladki-do-protez-15szt-p-3274.html>



Fittydent wodoodporne podkładki do protez 15szt.

Cena	16,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Fittydent

Opis produktu

Fittydent wodoodporne podkładki do protez. Przeznaczone dla osób z wąską lub płytką żuchwą. Wodoodporne podściółki/podkładki do protez to rozwiązanie dla osób poszukujących pewnego i trwałego mocowania protez zębowych. Dzięki wodoodpornej formule, podkładki te zapewniają stabilne przyleganie protezy do dziąsła, eliminując problem jej przesuwania się czy zsuwania, nawet w wilgotnym środowisku jamy ustnej.

Cechy produktu:

- **Wodoodporne:** podkładki są nierozpuszczalne w wodzie, są skuteczne nawet przy nadmiernym wydzielaniu śliny.
- **Dla wąskiej lub płaskiej żuchwy:** zaprojektowane dla osób z trudnościami w dopasowaniu protezy dolnej z powodu anatomicznych uwarunkowań.
- **Bez zawartości cynku:** bezpieczne dla zdrowia, nie zawierają cynku, co eliminuje ryzyko związane z jego nadmiernym spożyciem. **Skład:** Polyvinylacetate, Sodium Carboxymethylcellulose, Glycerintriacetate, Petrolatum.

Sposób użycia:

- Przygotowanie protezy: Dokładnie umyj i osusz protezę przed nałożeniem podkładki.
- Aplikacja podkładki: Usuń folię ochronną z obu stron podkładki, zginając ją wzdłuż środkowej linii.
- Dopasowanie: Umieść podkładkę na protezie i mocno dociśnij, usuwając ewentualne pęcherzyki powietrza. W razie potrzeby przytnij podkładkę nożyczkami, aby idealnie pasowała do kształtu protezy.

Obustronnie klejące, nierozpuszczalne w wodzie. Mocno i trwale łączą protezę z dziąsłami.

Opakowanie: Fittydent wodoodporne podkładki do protez 15 szt. (30g)