

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygiene360-prosept-jet-forte-2l-p-20.html>



HYGIENE360 PROSEPT Jet Forte / 2L

Cena	65,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OD-071120
Producent	HYGIENE360

Opis produktu

PROSEPT Jet Forte



Płynny koncentrat przeznaczony do pielęgnacji i czyszczenia urządzeń ssących, misek spluwaczek oraz separatorów amalgamatu. Preparat skutecznie usuwa pozostałości krwi, białka i innych osadów dzięki alkalicznym środkom aktywnym. Systematyczny rozkład biofilmu we wnętrzu urządzenia ssącego zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. **PROSEPT Jet Forte** nie zawiera substancji agresywnych, takich jak aldehydy lub fenole, zapewniając wysoką kompatybilność materiałową, jak również istotnie wydłużając trwałość węży i urządzeń ssących. Dodatkowo środki przeciw spieniające chronią części mechaniczne, gwarantując sprawne działanie urządzenia ssącego.

Zastosowanie produktu:

Ze względów bezpieczeństwa należy nosić rękawice i okulary ochronne. Przygotować roztwór roboczy zgodnie instrukcją na etykiecie. Użyć podziałki objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić właściwe dozowanie. Zassać 1,5 litra do urządzenia. Spuścić 0,5 litra do spluwaczki. Odczekać wymagany czas działania. Dokładnie spłukać urządzenie wodą.

Zawartość w 100 g: Związki alkaliczne, związki przeciw pieniające, specjalne środki powierzchniowo czynne.

Twoje korzyści:

Wysokowydajny koncentrat

2 litry koncentratu wystarczają na wyprodukowanie 100 litrów roztworu roboczego.

Silna moc czyszczenia

Zwalcza odkładający się biofilm oraz nieprzyjemny zapach, zapewniając niezawodną pracę urządzeń ssących.

Niepieniący się

Delikatny dla stomatologicznych urządzeń i wężyków ssących.

Biodegradowalne

Roztwór jest biodegradowalny i nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.



OD-071120