

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygiene360-prosept-sonic-1l-srodek-do-dezynfekcji-w-myjce-ultradzwiekowej-p-19.html>



## HYGIENE360 PROSEPT Sonic / 1L - środek do dezynfekcji w myjce ultradźwiękowej

Cena	<b>37,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>#OD-061050</b>
Producent	<b>HYGIENE360</b>

### Opis produktu

#### PROSEPT Sonic



**Wysokowydajny koncentrat służący do pełnego czyszczenia zanieczyszczonych przyrządów urządzeń ultradźwiękowych.**

**PROSEPT Sonic** to niepieniący koncentrat na bazie wysokowydajnych, aktywnych składników zasadowych, przeznaczony do skutecznego czyszczenia instrumentów dentystycznych i chirurgicznych, tj. narzędzi ścierających, pistoletów do amalgamatu, łopatek, dźwigni stomatologicznych, kleszczy ekstrakcyjnych oraz innych precyzyjnych instrumentów. Produkt z powodzeniem usuwa osady, pozostałości tkanki, krew, resztki białka, a nawet cement i gips. **PROSEPT Sonic** nie zawiera aldehydów i fenoli. Specjalnie zaprojektowana nakrętka z miarką o wymaganej jednostce objętości 20 ml umożliwia łatwą obsługę i dużą dokładność dozowania, dzięki czemu produkt można stosować w bardzo wydajny i ekologiczny sposób. **PROSEPT Sonic** można stosować w procedurach zanurzeniowych bez ultradźwiękowej kąpieli czyszczącej.

#### Zastosowanie produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy nosić rękawice i okulary ochronne. Przygotować roztwór roboczy zgodnie instrukcją na etykiecie. Użyć podziałki objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić właściwe dozowanie. Całkowicie zanurzyć narzędzia. Odczekać wymagany czas działania. Po zanurzeniu dokładnie przepłukać narzędzia wodą i osuszyć. Roztwór roboczy wymieniać dwa lub trzy razy w tygodniu, w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Zaleca się codzienną wymianę roztworu. Przed pierwszym zastosowaniem sprawdzić kompatybilność materiału. Nie stosować do czyszczenia narzędzi znakowanych kolorami i narzędzi wykonanych z włosa naturalnego, nylonu lub aluminium.

Zawartość w 100 g: 16 g wodorotlenku potasu, środek kompleksujący, specjalne środki powierzchniowo czynne.

#### Silny środek czyszczący

Silne właściwości oczyszczające środka czyszczącego eliminują konieczność czyszczenia wstępnego i ponownego.

#### Doskonałe właściwości oczyszczające

Usuwa nawet bardzo trwałe zabrudzenia takie jak krew, ślina czy gips.

#### Proste stosowanie

Nakrętka butelki zawiera oznaczenia ułatwiające szybkie dozowanie.



REF: OD-061050