

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygiene360-prosept-wipes-lemon-120-szt-p-682.html>

## HYGIENE360 PROSEPT Wipes Lemon / 120 szt.

Cena	<b>17,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>#0625</b>
Producent	<b>HYGIENE360</b>

### Opis produktu

#### PROSEPT Wipes



**Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej, pełnej dezynfekcji powierzchni bez pozostawiania osadów.**

**PROSEPT Wipes to nasączone chusteczki jednorazowego użytku, wykonane z odpornego na rozdarcia, nietkanego materiału.**

**PROSEPT Wipes** są przeznaczone do szybkiej i łatwej dezynfekcji oraz czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, takich jak stoły do badań, unity stomatologiczne, urządzenia medyczne i instrumenty nieinwazyjne. Starannie skomponowany preparat na bazie alkoholi zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie, nawet w przypadku dużej ilości zanieczyszczeń organicznych, np. krwi lub śliny. Niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO) poniżej 50% minimalizuje dolegliwości skórne i oddechowe, zapewnia doskonałą kompatybilność materiałową, jak również schnięcie bez pozostawiania śladów na dezynfekowanych powierzchniach. **PROSEPT Wipes** nie zawierają aldehydów i fenoli oraz ulegają biodegradacji. Wygodne wkłady uzupełniające gwarantują ekonomiczną i skuteczną dezynfekcję. Testowany dermatologicznie.

Twoje korzyści:

- \***Szerokie spektrum zastosowań**
- \*Skuteczny wobec bakterii, prątków, grzybów, jak również wirusów otoczkowych i bezotoczkowych.
- \***Zawierają poniżej 50% alkoholu**
- \*Chusteczki dezynfekujące do dezynfekcji wrażliwych powierzchni takich jak sztuczna skóra czy szkło akrylowe.
- \***Gotowe do użycia mokre chusteczki**
- \*Stosowanie chusteczek eliminuje potrzebę stosowania dezynfekcji w spreju, która może powodować podrażnienia układu oddechowego, oczu i nosa.
- \***Silnie nasycone chusteczki**
- \*Chusteczki dezynfekujące pozostają wilgotne do pół roku w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- \***Nie zostawia pozostałości suszenia-**
- \*Nie pozostawia smug, dzięki czemu nie ma potrzeby powtórnego wycierania.
- \***Dostępne w różnych rozmiarach**
- \*Wybierz rozmiar, który odpowiada Twoim potrzebom

(1) EN 13727, (2) Acinetobacter baumannii, beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, Kocuria rhizophila, gronkowiec złocisty, odporne na wankomycynę bakterie Enterococcus, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) wytyczne RKI/DVV, (8) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z wirusem zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru odporności, (9) wirus zastępczy FCoV, (10) wirus zastępczy dla wirusa bydłowej biegunki wirusowej, (11) EN 14476, (12) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych i bezotoczkowych, \* badanie nośnika

Spektrum zastosowań / Czasy ekspozycji:  
Bakteriobójcza (1)

15 sekund

Bakterie odporne na antybiotyki (2)	15 sekund
Gruźliczobójcza (3)	60 sekund
Prątkobójcza (3)	60 sekund
Drożdżobójcza (4)	15 sekund
Drożdże odporne na antybiotyki (5)	15 sekund
Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (8,11)	15 sekund
Wirus wirusowej biegunki bydła BVDV (7,11)	15 sekund
<b>Koronawirus (9,11)</b>	<b>15 sekund</b>
Wirus zapalenia wątroby typu B (11)	15 sekund
Wirus zapalenia wątroby typu C (10,11)	15 sekund
Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (7,11)	15 sekund
Ludzki wirus niedoboru odporności HIV (11)	15 sekund
Wirus grypy typu A H3N2 (7,11)	15 sekund
Wirus krowianki szczep Ankara MVA (11)	15 sekund
Wirusobójcze (11,12)	60 sekund
Adenowirus typu 5 (11)	60 sekund
Norowirus MNV (12)	60 sekund
Wirus polio typu 1 LSc-2ab (11)	60 sekund
Rotawirus szczep Wa (11)	30 sekund

#### **Formy dostawy**

\*Woreczek uzupełniający zawierający 120 chusteczek dezynfekujących (14,5 x 20 cm), zapach klasyczny

\*Woreczek uzupełniający zawierający 120 chusteczek dezynfekujących (14,5 x 20 cm), zapach cytrynowy

\*PROSEPT Wipes Tub T1 (pusta tubka),

