


„PULCHRITUDO A
DENTIBUS INCIPIT.”

„PIĘKNO ZACZYNA SIĘ OD ZĘBÓW”

informacje

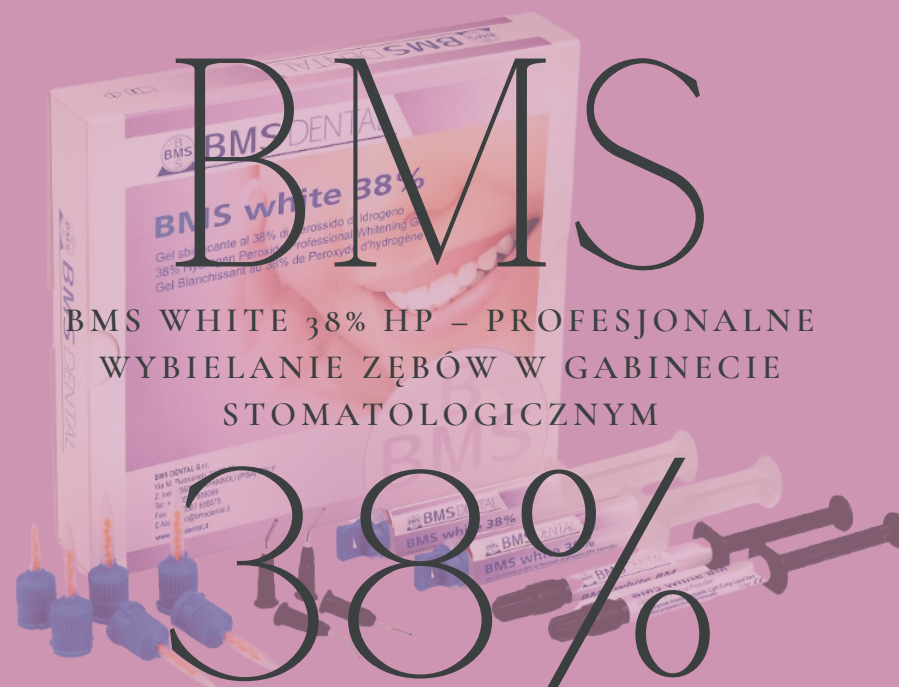

BMS WHITE 38% HP – PROFESJONALNE
WYBIELANIE ZĘBÓW W GABINECIE
STOMATOLOGICZNYM

WWW.HIGIENADENT.COM

WWW.HIGIENADENT.COM

KOMPLETNY SYSTEM GABINETOWY – SKUTECZNY, BEZPIECZNY, GOTOWY DO UŻYCIA

WPROWADZENIE

W PRZYPADKU MOCNO PRZEBARWIONYCH ZĘBÓW – ZARÓWNO ŻYWYCH, JAK I MARTWYCH – SKUTECZNE WYBIELANIE WYMAGA ZASTOSOWANIA SPRAWDZONYCH METOD MEDYCZNYCH. JEDNYM Z NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH ROZWIĄZAŃ DOSTĘPNYCH NA RYNKU JEST BMS WHITE 38% HP (MIESZANY 30%) – SYSTEM DO WYBIELANIA PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM.

DLACZEGO WARTO?

1. SKUTECZNOŚĆ PRZY GŁĘBOKICH PRZEBARWIENIACH:

PREPARAT PRZEZNACZONY JEST DLA PACJENTÓW Z POWAŻNYM PRZEBARWIENIAMI, U KTÓRYCH STANDARDOWE METODY WYBIELANIA OKAZUJĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE.

2. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI MEDYCZNYMI:

BMS WHITE 38% TO WYRÓB MEDYCZNY ZGODNY Z DYREKTYWĄ 93/42/EWG I NORMĄ EN ISO 28399, POTWIERDZA TO JEGO BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ.

3. BEZ KONIECZNOŚCI UŻYCIA LAMPY:

PREPARAT JEST AKTYWOWANY CHEMICZNIE, CO ELIMINUJE POTRZEBĘ DODATKOWEJ AKTYWACJI ŚWIATŁEM, SKRACAJĄC CZAS ZABIEGU I ZWIĘKSZAJĄC KOMFORT PACJENTA.

DLA KOGO?

SYSTEM WYBIELANIA PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA PACJENTÓW ZE WSKAZANIAMI MEDYCZNYMI – JEGO STOSOWANIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE POD KONTROLĄ LEKARZA STOMATOLOGA W GABINECIE.

JEŚLI ZMAGASZ SIĘ Z SILNYMI PRZEBARWIENIAMI ZĘBÓW I SZUKASZ SKUTECZNEGO ROZWIĄZANIA POD OKIEM SPECJALISTY – BMS WHITE 38% HP MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIĄ, KTÓREJ SZUKASZ.

ZESTAW BMS WHITE 38% ZAWIERA:

- 2 STRZYKAWKI (PO 2,5ML KAŻDA) 4:1 Z 38% ŻELEM WYBIELAJĄCYM ZAWIERAJĄCYM NADTLENEK WODORU,
- 2 STRZYKAWKI (PO 1,5G KAŻDA) DO OCHRONY DZIAŚEŁ,
- 6 KANIUL MIESZAJĄCYCH,
- INSTRUKCJĘ

SKŁADNIKI:

WODA, NADTLENEK WODORU, KRZEMIONKA,
GLICERYNA, ORGANICZNE AMINY,
POLIGLIKOLE, BARWNIK.

WSKAZANIA:

1. SILNE PRZEBARWIENIA ZĘBÓW ŻYWYCH I MARTWYCH, KTÓRYCH NIE DA SIĘ WYBIELIĆ PRZES SAMO CZYSZCZENIE.
2. PRZEBARWIENIA SPOWODOWANE MARTWICĄ MIAZGI.
3. CIĘŻKA FLUROZA.
4. PRZEBARWIENIA GENETYCZNE I DEGENERACYJNE.
5. PORFIRIA, ŻÓLTACZKA I INNE SCHOROZENIA METABOLICZNE POWODUJĄCE ZMIANY KOLORU ZĘBÓW.
6. ZEWNĘTRZNE BARWNIKI, KTÓRE WNIKŁY W GŁĄB TKANKI ZĘBA – NP. Z JEDZENIA, NAPOJÓW CZY TYTONIU.

PRZECIWWSKAZANIA

WYBIELANIE NIE JEST ZALECANE, GDY:

1. PRZEBARWIENIA MOŻNA USUNĄĆ MECHANICZNIE – NP. ZA POMOCĄ PAST POLERSKICH I SZCZOTECZEK OBROTOWYCH PODCZAS PROFESJONALNEGO OCZYSZCZANIA ZĘBÓW.
2. PACJENTKA JEST W CIĄŻY LUB KARMI PIERSIĄ – Z UWAGI NA BRAK WYSTARCZAJĄCYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA.
3. ISTNIEJE ALERGIA NA KTÓRYKOLWIEK ZE SKŁADNIKÓW ŻELU WYBIELAJĄCEGO.
4. U PACJENTA WYSTĘPUJE ODSŁONIĘTA ZĘBINA, CO ZWIĘKSZA RYZYKO NADWRAŻLIWOŚCI.
5. OBECNE SĄ NIESZCZELNE WYPEŁNIENIA LUB NIEWYLECZONA PRÓCHNICA (PIERWOTNA LUB WTÓRNA).
6. PACJENT NALEŻY DO GRUPY NAŁOGOWYCH PALACZY LUB ALKOHOLIKÓW, CO MOŻE WPŁYWAĆ NA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZABIEGU.
7. OSOBA JEST PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA – WYBIELANIE ZĘBÓW JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH.
8. ZABIEG MIAŁBY BYĆ PRZEPROWADZANY POD NARKOZĄ – NIE JEST TO ZALECANA FORMA LECZENIA ESTETYCZNEGO.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZACHĘCAMY DO LEKTURY BROSZURY: ‘‘ PYTANIA/ ODPOWIEDZI’’ . ZEBRALIŚMY W NIEJ 14 NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PYTAŃ O PRODUKT BMS WHITE 38%.

UWAGI I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

1. BMS WHITE 38% HP (MIESZANY 30%) TO 2-KOMPONENTOWY MATERIAŁ DO WYBIELANIA PRZEBARWIONYCH ZĘBÓW. POPRZECZ ZMIESZANIE OBU SKŁADNIKÓW ŻELU NASTĘPUJE AKTYWACJA ŚRODKA WYBIELAJĄCEGO.
2. CZAS TRWANIA ZABIEGU JEST USTALANY INDYWIDUALNIE, ZALEŻY OD WRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW, POŻĄDANEGO STOPNIA WYBIELENI ORAZ CHARAKTERU I ROZLEGŁOŚCI PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW.
3. KOLOROWY ŻEL MOŻNA NAKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO Z KOŃCÓWKI MIESZAJĄCEJ NA ZĘBY. JEGO LEPKA KONSYSTENCJA ZAPOBIEGA PRZYPADKOWEMU SPŁYWANIU.
4. NIEWYKORZYSTANY ŻEL MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANY DO KOŃCA OKRESU WAŻNOŚCI W ZAMKNIĘTEJ STRZYKAWCE. MOŻNA GO UŻYĆ WRAZ Z NOWA KOŃCÓWKĄ MIESZAJĄCĄ DO INNEGO ZABIEGU.
5. ŻEL POWINIEN BYĆ UŻYWANY W TEMPERATURZE POKOJOWEJ.
6. NANIEŚĆ ŻEL BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNIĘ ZĘBÓW. ŻEL NALEŻY NAKŁADAĆ NA GRUBOŚĆ OKOŁO 1-2 MM (UNIKAĆ KONTAKTU Z INNYMI CZĘŚCIAMI CIAŁA I UBRANIAM).
7. PODCZAS PROCESU WYBIELANIA PACJENT POWINIEN BYĆ UŁOŻONY W POZYCJI LEKKO POCHYLONEJ (KAT 45°), ABY MÓC WYGODNIE PRZELYKAĆ ŚLINE.
8. KOLOR ZĘBÓW PRZED I PO ZABIEGU POWINIEN BYĆ UDOKUMENTOWANY.
9. NADTLENEK WODORU OSŁABIA POLIMERYZACJĘ POLIMERÓW.
10. ZE WZGLĘDU NA WYSOKIE STĘŻENIE NADTLENKU WODORU ŻEL BMS WHITE 38% HP (MIESZANY 30%) JEST WYSOCE REAKTYWNY. ABY UNIKNĄĆ KONTAKTU ZE SKÓRĄ LUB OCZAMI ZALECAMY STOSOWANIE RĘKAWIC I OKULARÓW OCHRONNYCH.
11. PACJENT POWINIEN NOSIĆ OKULARY OCHRONNE.
12. W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO PRZECHOWYWANIA CIŚNIENIE W STRZYKAWCE MOŻE WZROSNAĆ I MOŻE DOJŚĆ DO NIEKONTROLOWANEGO ROZLANIA SIĘ ŻELU PODCZAS OTWIERANIA.
13. JEŚLI ŻEL WEJDZIE W KONTAKT ZE SKÓRĄ, NALEŻY GO USUNĄĆ I NATYCHMIAST SPŁUKAĆ WODĄ. W ZANIECZYSZCZONYM OBSZARZE MOGA POJAWIĆ SIĘ BIAŁE PLAMY, A PACJENT MOŻE ODCZUWAĆ PIECZENIE. OBJAWY POWINNY USTĄPIĆ PO OKOŁO 30-60 MINUTACH. W PRZYPADKU KONTAKTU ŻELU Z OCZAMI, NATYCHMIAST PRZEPŁUKAĆ I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

JAK PRZEBIEGA PROFESJONALNE WYBIELANIE ZĘBÓW PREPARATEM BMS WHITE 38% HP?

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

ZANIM STOMATOLOG PRZYSTĄPI DO WYBIELANIA, MUSI OKREŚLIĆ WSKAZANIA MEDYCZNE NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ DIAGNOSTYKI PACJENTA. KLUCZOWE ETAPY PRZYGOTOWANIA TO:

1. OCENA AKTUALNEGO KOLORU ZĘBÓW – DOKUMENTOWANA W CELU PORÓWNIANIA EFEKTÓW PRZED I PO ZABIEGU.
2. PROFESJONALNE CZYSZCZENIE ZĘBÓW – ZALECANE 1-2 TYGODNIE PRZED WYBIELANIEM.
3. PLANOWANIE LECZENIA ESTETYCZNEGO – PONIEWAŻ WYPEŁNIENIA I KORONY NIE ZMIENIAJĄ KOLORU, WYBIELANIE POWINNO POPRZEDZAĆ ICH WYKONANIE.

ETAP 1: OCHRONA JAMY USTNEJ

1. ODSŁONIĘCIE ZĘBÓW – ZĘBY SĄ EKSPONOWANE PRZY POMOCY ROZWIERAKA STOMATOLOGICZNEGO. USTA MOŻNA ZABEZPIECZYĆ PIELĘGNACYJNYM PREPARATEM OCHRONNYM.
 2. ZASTOSOWANIE GINGIVA PROTECTOR – TO ŚWIATŁOUTWARDZALNA ŻYWICA OCHRONNA, KTÓRA ZABEZPIECZA DZIAŚŁA I PRZYLEGŁE ZĘBY PRZED KONTAKTEM Z ŻELEM WYBIELAJĄCYM. APLIKACJA: 3-4 MM NA DZIAŚŁO + 0,5-1 MM NA ZĄB. PRACA W ĆWIARTKACH – KAŻDĄ POŁOWĘ SZCZĘKI UTWARDZA SIĘ ŚWIATŁEM PRZECZ OK. 25 SEKUND. USZCZELNIENIE MUSI BYĆ SZCZELNE – EWENTUALNE LUKI NALEŻY UZUPEŁNIĆ I PONOWNIE UTWARDZIĆ.
- ➡ ALTERNATYWNIE MOŻNA UŻYĆ GUMOWEJ ZAPORY.



ETAP 2: APLIKACJA ŻELU WYBIELAJĄCEGO

3. PRZYGOTOWANIE ŻELU BMS WHITE 38% HP
ŻEL POWINIEN MIEĆ TEMPERATURĘ POKOJOWĄ.
PO PRZYMOCOWANIU KOŃCÓWKI MIESZAJĄCEJ, NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZEPŁYW ŻELU NA GAZIKU.
4. APLIKACJA ŻELU NA ZĘBY
NAŁOŻYĆ WARSTWĘ ŻELU O GRUBOŚCI 1-2 MM BEZ KONTAKTU Z UBRANIAM I CZY SKÓRĄ.
PACJENT POWINIEN BYĆ W POZYCJI PÓŁLEŻĄCEJ (KĄT 45°) – TO UŁATWIA PRZELYKANIE ŚLINY.
5. CZAS DZIAŁANIA ŻELU
ŻEL POZOSTAJE NA ZĘBACH PRZES 15-20 MINUT.
MOŻNA NAŁOŻYĆ NOWĄ WARSTWĘ I POWTÓRZYĆ PROCES DO 3 RAZY (MAKS. 60 MINUT ŁĄCZNIE).
W PRZYPADKU NADWRAŻLIWOŚCI CZAS APLIKACJI NALEŻY SKRÓCIĆ.

ETAP 3: ZAKOŃCZENIE ZABIEGU

ŻEL USUWA SIĘ ZA POMOCĄ SSAKA, A NASTĘPNIE DOKŁADNIE SPLUKUJE WODĄ.
USUNĄĆ GINGIVA PROTECTOR ORAZ ROZWIERAK.
PACJENT PRZEPŁUKUJE USTA CIEPLĄ WODĄ.
DOKUMENTACJA KOŁORU ZĘBÓW PO ZABIEGU – DLA PORÓWNNANIA EFEKTÓW I DALSZEGO PLANOWANIA LECZENIA ESTETYCZNEGO.

PROFESJONALNE WYBIELANIE ZĘBÓW PREPARATEM BMS WHITE 38% HP TO PRECYZYJNA I KONTROLOWANA PROCEDURA, KTÓRĄ PRZEPROWADZA LEKARZ STOMATOLOG. TO NIE TYLKO ZABIEG ESTETYCZNY, ALE W WIELU PRZYPADKACH TAKŻE DZIAŁANIE MEDYCZNE – POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTA.



FOT.1.Stan wyjściowy C1, FOT. 2. efekt końcowy 3 sesji wybielania BMS 38% kolor B1

HOME ZACHOWAJ EFEKT PIĘKNEGO UŚMIECHU! WHITENING

PO PROFESJONALNYM WYBIELANIU ZĘBÓW W GABINECIE WARTO ZADBAĆ O UTRZYMANIE OSIĄGNIĘTEGO EFEKTU. IDEALNYM ROZWIĄZANIEM JEST DOMOWY SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW, KTÓRY POZWALA CIESZYĆ SIĘ BIAŁYM UŚMIECHEM JESZCZE DŁUŻEJ.

BMS DENTAL OFERUJE DWA PROFESJONALNE ŻELE DO SAMODZIELNEGO STOSOWANIA W DOMU:

- **BMS DENTAL HOME WHITENING 10% CP**
DELIKATNY ŻEL DO DOMOWEGO WYBIELANIA, IDEALNY DLA OSÓB Z WRAŻLIWYMI ZĘBAMI.
- **BMS DENTAL HOME WHITENING 16% CP**
MOCNIEJSZA FORMUŁA DLA SZYBSZEGO EFEKTU WYBIELANIA – POLECANA OSOBOM BEZ NADWRAŻLIWOŚCI.

DZIĘKI TYM PRODUKTOM PACJENT MOŻE SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE DBAĆ O SWÓJ UŚMIECH – TAKŻE POZA GABINETEM DENTYSTYCZNYM.

CO ZAWIERA ZESTAW HOME WHITENING?

- 4 STRZYKAWKI Z ŻELEM WYBIELAJĄCYM 3 ML (10% LUB 16%)
- 2 ARKUSZE
- PUDEŁKO
- INSTRUKCJĘ

