

Link do produktu: <https://higienadent.com/lascod-kromoglass-3-35g-glasjonomerowy-cement-mieszalny-z-woda-p-2255.html>



Lascod Kromoglass 3 / 35g - glasjonomerowy cement mieszalny z wodą

Cena	150,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT002740
Producent	Lascod

Opis produktu

Kromoglass 3 firmy Lascod to glasjonomerowy cement mieszalny z wodą. Służy do mocowania uzupełnień protetycznych. Jest bardzo drobnoziarnisty, charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkliwa i zębiny.

Idealnie nadaje się do:

- definitywnych osadzeń mostów, koron, wkładek inlay i nakładek onlay
- mocowania elementów stałych aparatów ortodontycznych
- podbudowy uzupełnień ceramicznych.

Wysokie uwalnianie fluoru przyczynia się również do trwałego wiązania i rozsądnie zmniejsza ryzyko powstania nowej próchnicy.

Właściwości:

- Cement na bazie wody (biokompatybilny)
- Bardzo drobna granulometria
- Doskonałe wiązanie ze szkliwem i zębina
- Wysoka odporność na ściskanie
- Stabilna ekspansja
- Niska rozpuszczalność
- Reaguje w niskiej temperaturze
- Silne i przedłużone uwalnianie fluoru

Proporcje mieszania: 1 g wody na 3,3 – 3,8 g proszku.

Czas mieszania: 40 sek.

Czas pracy łącznie z czasem mieszania: 3 – 3,5 min.

Czas wiązania w jamie ustnej: 4 - 5 min.

Cechy fizyczne po 24 godzinach:

- wytrzymałość na ściskanie: 90 – 130 MPa,
- grubość warstwy: 20 – 25 μ m,
- rozpuszczalność w wodzie: 0,3 – 0,9%.

Unikać kontaktu z oczami. Chronić przed wilgocią.

Opakowanie zawiera 35 g proszku, miarkę i dozownik.