

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-glasjonomerowy-gc-fuji-triage-1-1-proszek-plyn-p-109.html>



## Materiał glasjonomerowy GC Fuji Triage 1-1 / proszek + płyn

Cena	<b>350,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>003295</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

**GC Fuji Triage to nieprzepuszczalny dla promieni RTG materiał glasjonomerowy w kapsułkach do ochrony i wypełnień tymczasowych.** Produkty GC są jednym lepiej ocenianych produktów stomatologicznych. Znajdują rzeszę swoich zwolenników wśród dentystów.

GC Fuji Triage służy wyłącznie do stosowania przez stomatologa według zalecanych wskazań:

- ochrona bruzd
- ochrona powierzchni korzenia
- zapobieganie i kontrola nadwrażliwości
- ochrona niedojrzałego szkliwa
- wypełnienia tymczasowe po leczeniu endodontycznym
- wypełnienia pośrednie.

Nie należy stosować GC Fuji Triage podczas pokrycia obnażonej miazgi.

Odcień różowy - wiązanie „na komendę”

Odcień biały - wyłącznie wiązanie chemiczne.

Stosunek proszek/płyn: 0,30g/0,15g

Czas mieszania: 10sek.

Czas pracy: 1min40sek.

Czas wiązania netto: 2min30sek

Czas rozpoczęcia końcowego opracowania: 6min

Czas rozpoczęcia końcowego opracowania w przypadku naświetlenia (różowy) 4 min

Należy przygotować niezwłocznie przed aplikacją powierzchnię zęba. Przed aktywacją należy wstrząsnąć kapsułką, aby spulchnić proszek, rozpocząć aktywację poprzez całkowite wciśnięcie tłoka kapsułki do jej wnętrza. Wprowadzić kapsułkę do podajnika - w ten sposób zostanie aktywowana, umieścić kapsułkę we wstrząsarce i mieszać przez 10 sekund. Umieścić kapsułkę w podajniku GC Capsule Appiler. Dwukrotnie nacisnąć dźwignię, czas pracy wynosi 1 minutę 40 sekund od początku mieszania przy 23stopniach. Wycisnąć materiał na zęba i rozprowadzić na całej powierzchni. Po nałożeniu powierzchnię i brzegi pokryć GC Fuji VARNISH lub warstwą GC Fuji COALT LC. Opracowanie ostateczne z użyciem sprayu wodnego można przeprowadzić po upływie 6 minut od początku mieszania. Na opracowane powierzchnie ponownie nałożyć GC Fuji VARNISH lub GC Fuji COALT LC.

Odcienie do wyboru: Różowy, Biały.

Opakowanie: 15g proszek, 8ml płyn, 5,7 ml dentin conditioner, miarka do proszku, bloczek do mieszania.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolory:** biały , różowy