

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-glasjonomerowy-w-kapsulkach-gc-fuji-triage-kapsulki-50-szt-p-108.html>



Materiał glosjonomerowy w kapsułkach GC Fuji Triage kapsułki / 50 szt.

Cena	495,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	003298
Producent	GC

Opis produktu

GC Fuji Triage to nieprzepuszczalny dla promieni RTG materiał glosjonomerowy w kapsułkach do ochrony i wypełnień tymczasowych. Produkty GC są jednym lepiej ocenianych produktów stomatologicznych. Znajdują rzeszę swoich zwolenników wśród dentystów.

GC Fuji Triage służy wyłącznie do stosowania przez stomatologa według zalecaných wskazań:

- ochrona bruzd
- ochrona powierzchni korzenia
- zapobieganie i kontrola nadwrażliwości
- ochrona niedojrzałego szkliwa
- wypełnienia tymczasowe po leczeniu endodontycznym
- wypełnienia pośrednie.

Nie należy stosować GC Fuji Triage podczas pokrycia obnażonej miazgi.

Odcień różowy - wiązanie „na komendę”

Odcień biały - wyłącznie wiązanie chemiczne.

Stosunek proszek/płyn: 0,30g/0,15g

Czas mieszania: 10sek.

Czas pracy: 1min40sek.

Czas wiązania netto: 2min30sek

Czas rozpoczęcia końcowego opracowania: 6min

Czas rozpoczęcia końcowego opracowania w przypadku naświetlenia (różowy) 4 min

Należy przygotować niezwłocznie przed aplikacją powierzchnię zęba. Przed aktywacją należy wstrząsnąć kapsułką, aby spulchnić proszek, rozpocząć aktywację poprzez całkowite wciśnięcie tłoka kapsułki do jej wnętrza. Wprowadzić kapsułkę do podajnika - w ten sposób zostanie aktywowana, umieścić kapsułkę we wstrząsarce i mieszać przez 10 sekund. Umieścić kapsułkę w podajniku GC Capsule Appiler. Dwukrotnie nacisnąć dźwignię, czas pracy wynosi 1 minutę 40 sekund od początku mieszania przy 23stopniach. Wycisnąć materiał na zęba i rozprowadzić na całej powierzchni. Po nałożeniu powierzchnię i brzegi pokryć GC Fuji VARNISH lub warstwą GC Fuji COALT LC. Opracowanie ostateczne z użyciem sprayu wodnego można przeprowadzić po upływie 6 minut od początku mieszania. Na opracowane powierzchnie ponownie nałożyć GC Fuji VARNISH lub GC Fuji COALT LC.

Odcienie:

- Różowy
- Biały

Opakowanie zawiera:50 kapsulek w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory: biały , różowy