

Link do produktu: <https://higienadent.com/nakladki-termokurczliwe-do-wybielania-zebow-2szt-p-1819.html>



Nakładki termokurczliwe do wybielania zębów 2szt.

Cena	7,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00223
Producent	Inny

Opis produktu

Specjalne termoaktywne nakładki pozwalają, aby żel dotarł wszędzie i optymalnie działał na całe zęby.

Instrukcja obsługi:

- Podgrzać wodę do temperatury bliskiej wrzenia.
- Umieścić ustawioną nakładkę pionowo w wodzie tak, aby była w pełni zanurzona (na ok. 5 sekund). Nakładka staje się bardziej przezroczysta. Nie należy dopuścić do sklejenia się jej ścianek na wskutek uplastycznienia materiału.
- Wyjąć nakładkę z wody. Przed włożeniem jej do jamy ustnej, sprawdzić palcami, czy nie jest zbyt gorąca.
- Umieścić nakładkę w jamie ustnej, tak jak przedstawiono na rysunku, zakrywając nią na kształt litery U cały łuk zębowy.
- Zaciśnąć usta i dociskając nakładkę za pomocą palców, policzków i języka przytrzymać przez 30 sekund, odsysając jednocześnie wodę z szyny.
- Ściągnąć nakładkę z łuku zębowego i ostudzić pod strumieniem zimnej wody.
- Nakładkę można odpowiednio dociąć, zapewniając w ten sposób niezbędną wygodę użytkowania. Należy pamiętać, że precyzyjne dopasowanie nakładki obniża zużycie żelu i gwarantuje optymalne wybielanie. Uwaga: jeżeli nakładka jest zbyt zimna aby dopasować ją do zębów lub jej ścianki skleiły się, można powtórzyć operację nagrzewania.

W skład zestawu wchodzi: 1 nakładka na dolny łuk zębów oraz 1 nakładka na górny łuk zębów.