

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-cerkamed-fluor-defender-maxi-10-x-1ml-lakier-ochronny-z-fluorem-dla-dzieci-p-1141.html>



OUTLET CerKamed Fluor Defender Maxi 10 x 1ml - lakier ochronny z fluorem dla dzieci.

Cena	80,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT001309
Producent	Cerkamed

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Fluor Defender Maxi - lakier ochronny z fluorem dla dzieci.

Właściwości:

- Wzmacnianie odporności szkliwa,
- Profilaktyka próchnicy
- Dzięki zawartości fluoru działa remineralizująco na szkliwo.
- Tworzy na powierzchni film ochronny.

Skład: 0,1% fluorosilan, HEMA

Sposób użycia:

- Oczyszczyć powierzchnie zębów
- Osuszyć za pomocą strumienia powietrza lub wałków z ligniny
- Odizolować obszar roboczy za pomocą koferdamu
- Otworzyć ampułkę i pobrać do przygotowanego wcześniej naczynia około 3 krople preparatu
- Nakładać równomiernie cienką warstwę przy pomocy załączonego pędzelka
- W przypadku wąskich przestrzeni międzyzębowych można użyć nici dentystycznych
- Osuszyć łagodnie strumieniem powietrza
- Usunąć koferdam
- Nie jeść i nie płukać jamy ustnej przez minimum 45 min po zabiegu
- Fiolka wyrobu przeznaczona jest dla 2-3 pacjentów z pełnym uzębieniem, pędzelek służy do użycia jednokrotnego.
- Wielokrotne użycie pędzelka może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia. Lakier nie wymaga utwardzania światłem.

Dostępne opakowanie:

Fluor Defender maxi: 10 x 1ml preparatu + komplet pędzelków

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA