

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-cerkamed-silan-2ml-p-1956.html>

## OUTLET Cerkamed Silan 2ml



Cena	<b>58,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00241</b>
Producent	<b>Cerkamed</b>

### Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

#### **Cerkamed Silan silan metakrylanowy.**

Silan nakłada się na porcelanę po jej wytrawieniu, przed zastosowaniem systemu wiążącego w celu podniesienia trwałości wiązania pomiędzy żywicą i porcelaną.  
Można stosować do silanizacji włókien szklanych.

Sposób postępowania z wyrobem SILAN:

Przed przystąpieniem do zabiegu należy załączony aplikator zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy), a następnie umieścić na strzykawce.

1. Nakręcić aplikator z pędzelkiem na strzykawkę z SILANEM w miejsce nakrętki zabezpieczającej.
2. Wetrzeć SILAN w wytrawioną wcześniej powierzchnię porcelany.

Nie płukać! Wysuszyć strumieniem powietrza.

Powierzchnia porcelany jest gotowa do nałożenia systemu wiążącego.

#### Komfort użycia i bezpieczeństwo aplikacji

Pełną wygodę oraz precyzję aplikacji zapewniają wysokiej jakości strzykawki z gwintem typu luer-lock, w które konfekcjonowane są nasze preparaty. Gwint luer-lock umożliwia łatwe i wygodne połączenie strzykawki z aplikatorem, poprzez nakręcenie go na strzykawkę. Stanowi to najlepsze zabezpieczenie przed niezamierzonym rozlaniem preparatu podczas aplikowania.

**WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA**

Opakowanie: strzykawka 2ml