

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-dentsply-sirona-ah-plus-jet-1-x-15g-dwuskładnikowy-bazakatalizatormaterial-do-stalego-uszczelniania-kanalów-korzeniowych-p-1715.html>



OUTLET Dentsply Sirona AH Plus Jet 1 x 15g - dwuskładnikowy (baza+katalizator) materiał do stałego uszczelniania kanałów korzeniowych

Cena	353,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	60620118
Producent	Dentsply Sirona

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Dentsply Sirona AH Plus Jet dwuskładnikowy (baza+katalizator) materiał do stałego uszczelniania kanałów korzeniowych.

Zastosowanie:

- Długotrwałe wypełnianie kanałów korzeniowych;
- Technika pojedynczego ćwieka

Przygotowaną mieszankę nałożyć na końcówkę wypełniacza kanału. Upewnij się, że w mieszaninie nie tworzą się pęcherzyki powietrza. Wypełniacz kanału wstrzykiwać z bardzo małą prędkością, aby zapewnić optymalną ilość mieszanki w kanale. Konieczne jest również wycofanie wypełniacza z małą prędkością.

AH Plus można również podawać wiertłem. Należy dobrać rozmiar wiertła (które było używane jako ostatnie do czyszczenia kanału wierzchołkowego). Pastę można zebrać wiertłem, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wypełnienie kanału korzeniowego.

Jeśli pasta AH Plus jest stosowana w połączeniu z gutaperką, do rozszczelnienia wypełnienia można zastosować tradycyjne metody usuwania gutaperki.

Pasta nadaje się do pracy przez co najmniej 4 godziny w temperaturze pokojowej.

Czas wiązania to co najmniej 8 godzin.

Strzykawka: 1x15g

Opakowanie zastępcze.