

Link do produktu: <https://higienadent.com/preparat-do-poszerzania-kanalow-korzeniowych-w-formie-zelu-cerkamed-endo-prep-gel-p-370.html>



Preparat do poszerzania kanałów korzeniowych w formie żelu CerKamed Endo-Prep Gel

Cena	30,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000823
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Cerkamed Endo-Prep Gel preparat do poszerzania kanałów korzeniowych w formie żelu . Preparat przeznaczony jest do chemiczno-mechanicznego oczyszczania i opracowywania kanałów korzeniowych. Poprzez zawarte w preparacie substancje poślizgowe praca za pomocą narzędzi kanałowych jest ułatwiona, a ryzyko złamania narzędzia w kanale jest zminimalizowane.

Zastosowanie i właściwości preparatu Endo-Prep Gel:

- stosowany jest podczas chemiczno-mechanicznego oczyszczania i opracowywania kanałów korzeniowych.
- zawiera substancje poślizgowe ułatwiające wprowadzenie narzędzia do kanału oraz minimalizujące niebezpieczeństwo jego zaklinowania lub złamania wewnątrz kanału.
- wersenian disodowy (EDTA) zawarty w preparacie wyłukując jony wapnia i magnezu powoduje rozmiękczenie powierzchniowej warstwy zębiny ułatwiając jej usunięcie i udrożnienie kanału. Działanie wersenianu disodowego polega na reakcji z mineralnymi składnikami tkanek twardego zęba. Poprzez absorpcję z kanału zęba głównie wapnia, wersenian disodowy rozmiękcza tkankę i ułatwia mechaniczne udrożnienie kanału zębowego.
- doskonale dobrana żelowa konsystencja gwarantuje wygodę aplikacji i możliwość umieszczenia preparatu bezpośrednio na narzędziu kanałowym.
- zastosowanie strzykawek typu luer-lock daje gwarancję bezpieczeństwa podczas aplikacji - strzykawki posiadają gwint typu luer-lock pozwalający na połączenie z igłą poprzez nakręcenie jej na strzykawkę, system luer-lock stanowi najlepsze zabezpieczenie przed niezamierzonym rozlaniem preparatu podczas aplikowania.

Użycie produktu:

Odizolować leczony ząb za pomocą koferdamu. Wypełnić preparatem komorę zęba lub umieścić preparat bezpośrednio na narzędziu kanałowym. Opracowywać mechanicznie kanał przepłukując roztworem podchlorynu sodu (np. CHLORAXID).

Wygoda użytkowania:

Pełną wygodę oraz precyzję aplikacji zapewniają wysokiej jakości strzykawki, w które konfekcjonowane są nasze preparaty. Gwint luer-lock oraz gumowy tłoczek strzykawki zapewniają komfort i bezpieczeństwo pracy.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Dostępne opakowanie: 5ml, 10ml

Do każdego opakowania dołączony jest zestaw aplikatorów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strzykawka rozmiar: 5ml , 10ml