

Link do produktu: <https://higienadent.com/testy-do-kontroli-sterylizacji-w-autoklawie-sps-steam-indicator-strip-250-szt-p-2054.html>



## Testy do kontroli sterylizacji w autoklawie SPS Steam Indicator Strip / 250 szt.

Cena	<b>52,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000338</b>
Producent	<b>SPS Medical</b>

### Opis produktu

**SPS Steam Indicator Strip.** Liniowe wskaźniki są przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi parą wodną, podwójny test kontroli sterylizacji parowej jest wszechstronnym wskaźnikiem pozwalającym określić, czy zostały osiągnięte niższe granice kluczowych parametrów procesu w całym cyklu sterylizacji, czas reakcji wskaźnika jest kontrolowany przez precyzyjnie dobrany nietoksyczny skład chemiczny, który jest pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich, rozmiar całego wskaźnika 1,70 cm x 20,50 cm. Test Steam - zmiana barwy z niebieskiej na czarną zakres temp. 121°C-141°C, czas 3,5 min-20 min

#### Normy:

Odpowiada normom: ISO 11140-1 klasa 4 Klasyfikacja wg norm EN 867-1 klasa D

#### Sposób użycia:

Test chemiczny umieszcza się wewnątrz pakietu przeznaczonego do sterylizacji. Po sterylizacji wyjmij wskaźnik i sprawdź zmiany koloru.

#### Przechowywanie i okres przydatności:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zachowując odpowiednią rotację zapasów. Należy zachować niski poziom wilgotności w pomieszczeniu oraz temperaturę poniżej 30°C. Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

#### Producent:

SPS MEDICAL Supply Corp., USA

#### Opakowanie:

STEAM INDICATOR STRIP - SIL-250, 500 wskaźników (250 pasków) w opakowaniu