


Link do produktu: <https://higienadent.com/tubulex-jalowe-tampony-dezynfekujace-32szt-p-2555.html>

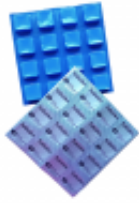

Tubulex jałowe tampony dezynfekujące 32szt.

Cena	27,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KAT00141
Producent	Dental Therapeutics

Opis produktu

Tubulex jałowe tampony dezynfekujące z hydrofilnej włókniny medycznej, nasączone preparatem [Tubulicid Blue](#).

Właściwości:

- dezynfekuje śluzówkę jamy ustnej, gardła, warg, nosa, kąta ust
- redukuje bakterie
- nie zawiera antybiotyku
- dzięki fizjologicznemu pH nie drażni śluzówki jamy ustnej, gardła, nosa...
- zapobiega powstawaniu stanów zapalnych po operacjach w ustach, gardle
- eliminuje tzw. "zajady" w kątach ust, stany zapalne warg, nosa, itp.
- pobudza do regeneracji.

Wskazania:

- przetarcia błony śluzowej przed i po każdej iniekcji, przez 1-2min.
- chirurgia jamy ustnej - dezynfekcja błony śluzowej, przed i podczas ekstrakcji zębów stałych lub mlecznych; po ekstrakcji nałożyć Tubulex na 30min - po posiłkach przez 3 dni, rany goją się rychłozrostem
- polecany u pacjentów z obniżoną odpornością, chorych na cukrzycę, nerczyce, a specjalnie z endokarditis i po naświetlaniach pr. Röntgena u których należy wykonać zabieg krwawy w jamie ustnej/gardle/nosie
- zalecamy dać pacjentowi 3-5 gazików by stosował je po posiłkach
- ból po ekstrakcyjny - przykryć tamp. Tubulex zębodół przez 30 min
- implantologia - przed i po operacji, rozłożonym Tubulex w kształcie prostokąta przykryć szwy, eliminacja peri-implantitis, stosować 2-3dni
- periodontologia - przed i po depuracji (usunięciu kamienia nazębnego) przykryć całą okolicę na 30 min.
- endodoncja - oczyszczenie i dezynfekcja poszerzaczy K/H z martwej lub zgorzelinowej miazgi a przed ich powtórny użyciem w kanale
- protetyka - np. skaleczenie cierniem lub klamrą protezy szkieletowej
- ortodoncja - np. skaleczenie warg/policzków klamrą
- początkowe stany zapalne podniebienia (w kącie ust, skaleczenia...)
- kosmetyka - przed i po zabiegach - np. przekłuwanie języka, warg.

Opakowanie: 32szt.