

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-opalescence-pf-16-4-x-1-2ml-p-1834.html>

Ultradent Opalescence PF 16% 4 x 1,2ml



Cena	110,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Ultradent

Opis produktu

Ulepszona formuła preparatów Opalescence PF (potassium nitrate, fluoride) opartych na nadttlenku karbamidu, dodatkowo zawierających fluor i azotan potasu - przeciwko nadwrażliwości, zwiększa komfort kuracji. Dodatek azotanu potasu oraz jonu fluorowego pozwala na wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie nadwrażliwości w trakcie wybielania. Wartość pH preparatu Opalescence wynosi około 6,5 (zbliżona do neutralnej). Preparat zawiera 20% wody, co zmniejsza ryzyko odwodnienia zębów.

Aby przeprowadzić kurację metodą nakładkową Opalescence, lekarz pobiera wyciski, pozwalające na wykonanie specjalnych, indywidualnych dla każdego pacjenta nakładek na zęby. Przezroczysta, wygodna i elastyczna nakładka zapewnia bezpieczeństwo wybielania podczas snu i jest niezauważalna w ciągu dnia. Nakładki wykonuje technik z użyciem formierza próżniowego. Na modelu, za pomocą żywicy blokującej załączonej do zestawu, technik wykonuje zbiorniczki zwiększające skuteczność terapii poprzez zwiększenie ilości żelu wybielającego mieszczącego się w nakładce. Lekarz stomatolog wydaje pacjentowi strzykawkę z żelem Opalescence, wyjaśnia jak go aplikować do nakładek i na jaki czas je zakładać. W domu pacjent w prosty sposób umieszcza nakładkę wypełnioną żelem na zębach i pozostawia ją na całą noc lub na kilka godzin w ciągu dnia. Z reguły kuracja trwa około tygodnia. Kuracja jest bardzo bezpieczna dla pacjenta, najnowsze badania dowiodły, że preparaty Opalescence PF przyczyniają się do remineralizacji szkliwa i zapobiegają powstawaniu próchnicy. Po założeniu nakładki na zęby żel pozostaje aktywny przez 8 do 10 godzin. Duże rozjaśnienie zębów uzyskuje się już po pierwszej nocy. Uzupełnienia protetyczne (np. korony i mosty) oraz wypełnienia nie ulegają wybieleniu. W razie potrzeby, po ustabilizowaniu się koloru (co trwa zwykle dwa tygodnie), lekarz stomatolog może je wymienić dobierając odpowiedni jaśniejszy kolor. W czasie wybielania u kilku procent pacjentów występuje przejściowa nadwrażliwość zębów na zimno, ustępująca w ciągu jednego do trzech dni po zakończeniu kuracji. Lekarz stomatolog może zalecić zastosowanie specjalnego preparatu (Ultra Ez) minimalizującego jej objawy.

Żel Opalescence jest pakowany w małe strzykawki o poj. 1,2 ml zawierające jednorazową dawkę preparatu.
Dostępne smaki: regular, mięta.

WAŻNE:

Stężenie procentowe H₂O₂ obecnego lub uwolnionego umieszcza się na etykiecie. Nie stosować u osób poniżej 18. roku życia. W każdym cyklu stosowania pierwsze zastosowanie przez lekarza dentystę lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewnia to równoważny poziom bezpieczeństwa. Następnie wyrób wydaje się konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania.

Produkt jest produktem profesjonalnym, dostępnym WYŁĄCZNIE dla gabinetów stomatologicznych oraz dla lekarzy stomatologów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.10.2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. poz. 1185) dot. stosowania nadttlenku wodoru (i związków go uwalniających); niniejszy produkt zakupić może WYŁĄCZNIE lekarz stomatolog, po okazaniu numeru wykonywania zawodu oraz numeru identyfikacji podatkowej. Do transakcji obowiązkowym dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT.

Zamówienia indywidualne zostaną przez nas anulowane.

Opakowanie: 4x strzykawka 1,2ml w wybranym smaku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Smak: mięta , neutralny