

Link do produktu: <https://higienadent.com/ultradent-opalescence-ultra-ez-1-2ml-preparat-do-znoszenia-nadwrazliwosci-p-1826.html>

Ultradent Opalescence Ultra EZ 1,2ml - preparat do znoszenia nadwrażliwości



Cena	21,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Ultradent

Opis produktu

Ultra EZ to preparat do znoszenia nadwrażliwości spowodowanej odsłoniętą zębiną korzeni, chorobami przyzębia; wybielaniem; oszlifowaniem zębów pod uzupełnienia protetyczne; starciem zębów spowodowanym szczotkowaniem.

Ultra EZ zawiera 3% (wagowo) azotanu potasu i 0,11% (wagowo), tzn. 1100 ppm jonu fluorowego. Preparat jest gęstym, lepkim żelem (łatwym do aplikacji), powoli uwalniającym substancję czynną. Służy do usuwania nadwrażliwości spowodowanej odsłoniętą zębiną korzeni, chorobami przyzębia, wybielaniem, oszlifowaniem zębów pod uzupełnienia protetyczne, starciem zębów spowodowanym szczotkowaniem itp.

Sposób użycia: po sporządzeniu nakładki wypełnia się ją preparatem Ultra EZ i nakłada na zęby. Przy nadwrażliwości zlokalizowanej - wystarczy wypełnić odpowiadający fragment nakładki oraz okolicę zębów trzonowych nakładki, aby zapewnić jej właściwe utrzymanie. W przypadku nadwrażliwości szyjek zębów można wykonać nakładkę ze zbiorniczkami w okolicy szyjek, obejmującą również dziąsła. Czas pozostawiania nakładki z żelem i liczbę aplikacji lekarz powinien ustalić uwzględniając stopień nadwrażliwości u danego pacjenta. Zalecany czas kuracji: od 15 minut do 2 godzin.

Produkt jest produktem profesjonalnym, dostępnym WYŁĄCZNIE dla gabinetów stomatologicznych oraz dla lekarzy stomatologów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.10.2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. poz. 1185) dot. stosowania nadtlenku wodoru (i związków go uwalniających); niniejszy produkt zakupić może WYŁĄCZNIE lekarz stomatolog, po okazaniu numeru wykonywania zawodu oraz numeru identyfikacji podatkowej. Do transakcji obowiązkowym dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT.

Zamówienia indywidualne zostaną przez nas anulowane.

Strzykawka: 1,2ml